

# ドクター ヒュービー ポート クリーナー

## 再使用禁止

### 【警告】

- ・使用中に過度に引っ張る等の負荷を加えないこと。  
[脱脂綿が脱落する可能性があるため。]

### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

内視鏡手術において、体内に装着したトロッカーの清掃を体組織に触れうる方法で行うことを目的とした器具で、紙軸の先端に脱脂綿を巻きつけたものであり、酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

#### 2. 寸法

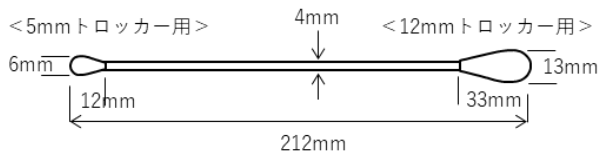

#### 3. 原材料

脱脂綿、紙、ポリビニルアルコール（糊剤）、グリセリン（糊剤）

#### 4. 原理

内視鏡手術において、体内に装着したトロッカーに挿入し、体液で汚れたトロッカー内部を先端の脱脂綿により清掃する。

### 【使用目的又は効果】

内視鏡手術において、体内に装着した機械器具（トロッカー）の清掃を体組織に触れうる方法で行うことを目的とした器具で、これにより手術時の内視鏡の汚れを低減する。

### 【使用方法等】

内視鏡手術において、内視鏡を引抜いた状態のトロッカーに本品を挿入し、トロッカー内部を清掃する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1. 包装開封後、速やかに使用すること。
- \* 2. 本品の使用前若しくは使用中に生理食塩水等液体に浸さないこと。[綿体の接着強度が低下するおそれがあるため。]
- \* 3. 本品を用いてトロッカー内部を清掃後、本品脱脂綿が浸軟している場合若しくは本品脱脂綿の変形が見られる場合、継続使用を止め、新しい製品を使用すること。[綿体の接着強度が低下するおそれがあるため。]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)