

# カウントラック

手術後の後カウントをより確実にするためのホルダーです。



## ▶ご使用方法例



溝と溝を入れて差し込みます。



図のような状態に仕上げます。



ガーゼの両端を持ち、左右の溝の位置がずれないように確認しながら差し込みます。



次に隣の溝に順次差込んでいきます。



10枚以上ガーゼを入れる場合は、上下逆にして同様に差込んでいきます。



使用后、両手でおさえながらつぶし、感染性廃棄物として捨てます。

## 製品特長

- 1セットで最大20枚までガーゼカウントが可能。
- カウントが合わない場合でも、リカウントが一目で分かりスムーズに行える。
- 使用后、ガーゼを差し込んだままケースを折りたたんで廃棄が可能。

※ガーゼは、別売になっています。

※燃やしても、ダイオキシン類の有害物質は一切発生しません。

サイズ：

- ▶ 19.5cm×6cm(1枚あたり)
- ▶ 4枚1組になっています。

品番	包装	JANコード
1153630	4枚/セット × 100セット	 4 958286 701615

※詳細は各営業にお問い合わせください



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826  
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 三重営業所 ☎059-350-3844