

医 04 整形用品
一般医療機器 開腹術用スポンジ JMDN コード 15085000

エレファスポンジ (ヒモ付)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- *2. 電気メス等を近づけないこと。【引火する恐れがある】

【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて四方を千鳥縫いで縫製したもので、柄を取り付けている。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

【使用方法等】

- *使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- *1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行うから使用すること。
- *4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
*<http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

医 04 整形用品
一般医療機器 開腹術用スポンジ JMDN コード 15085000

エレファスポンジ (ヒモなし)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- *2. 電気メス等を近づけないこと。【引火する恐れがある】

【形状・構造及び原理等】

綿 100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて四方を千鳥縫いで縫製したものである。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

【使用方法等】

- *使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
**1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
**<http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)