

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード 13700000

# エレファーズ

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- \* 2. 電気メス等を近づけないこと。【引火する恐れがある】

### 【形状・構造及び原理等】

\*綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品である。

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\*1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
\*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*\*<http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)