

ハクゾウアイスティック


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- * 柄の片側にセルローススポンジを取り付けている。
本品は酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行っている。

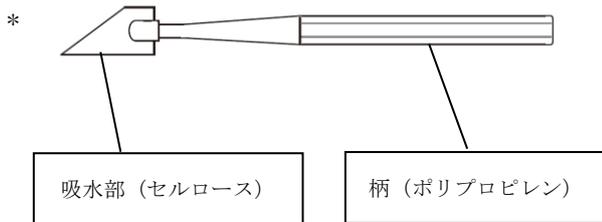

- * 全長: $85\text{mm} \pm 8.5\text{mm}$

【使用目的又は効果】

眼科等の処置時に体液・排出液及び薬液等を吸収・除去するために用いる。視認性の確保・向上に繋がる。

【使用方法等】

柄の部分を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所に向けて吸収する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- * 1. 吸水部や柄を切断する等の行為は絶対にしないこと。
 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 包装開封後、すぐに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

- * 本品の容器若しくは被包に記載
- * [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
* <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)