

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ JMDNコード 32374000

## ハクゾウラパロガーゼG

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 1. 再使用禁止

\*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。

[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]

\*3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

\*綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X線で検知できる糸を織り込んだものである。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム (造影剤) ・スチレン系エラストマー (固定材) ・TET 5MA636 GRN (着色剤)

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

#### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

\*\*1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)