

# ハクゾウ オペガーゼNEOクロス

[一般医療機器] X線造影材入りガーゼ 届出番号: 27B2X00243000015  
販売名: ハクゾウオペガーゼNEO

単回使用


2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、  
より視認性を向上させた未滅菌のガーゼです。



業界初!!  
X線造影糸  
4本入り。



## 《X線造影糸の比較写真》

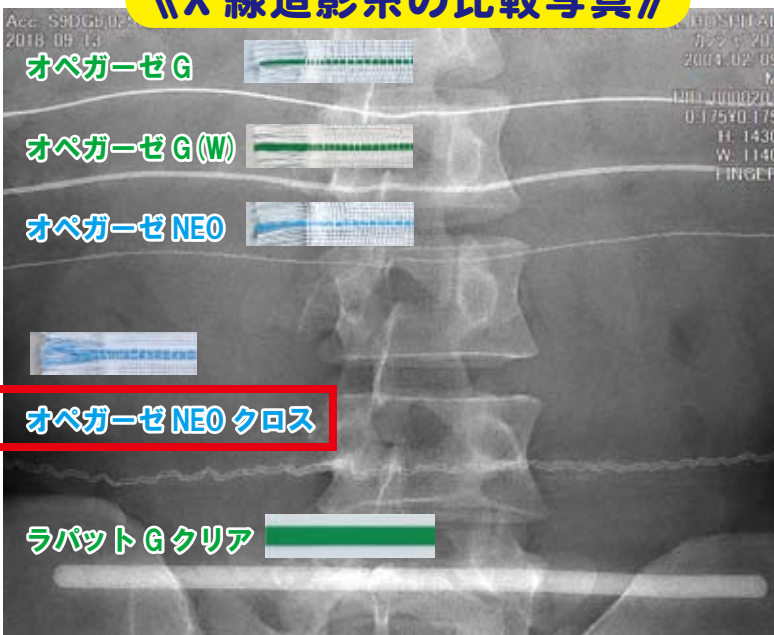

### 【製品特長】

- ◎新しい製造手法で、品質を向上させた手術用ガーゼです。
- ◎2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせている為、従来のX線ガーゼよりも造影糸が抜けにくく、視認性に優れております。  
(業界初のX線造影糸4本入りガーゼです。)
- ◎2折、4折、平重ねの3種類からお選び頂くことができます。

※体の下に各種ガーゼを置いて、レントゲン撮影を行った時の写真となります。

\*\*2019年5月改訂(第4版)

\*\*2016年4月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号：27B2X00243000015

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ JMDNコード 32374000

# ハクゾウオペガーゼNEO

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

### 【形状・構造及び原理等】

\*\*綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X線で検知できる糸を織り込んだものである。またそれに柄を付けているものもある。

#### [X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム(造影剤) ・ポリプロピレン(固定材) ・ウルトラマリン(着色剤)

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*1. 体内に留置しないこと。
  2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \*2. 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- \* <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)
- 添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。  
<http://www.pmda.go.jp/>

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1156800	平重ね	30cm×30cm	300枚/包	10包	4 958286 715018
1156802	2折	30cm×30cm	300枚/包	10包	4 958286 712161
1156804	4折	30cm×30cm	300枚/包	10包	4 958286 073910

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975  
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188  
北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253  
仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
徳島営業所 ☎087-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320