

滅菌済


再使用禁止



Design Your Voice  
**Hakuzo**

**SS**  
Steri Space

ボックス®

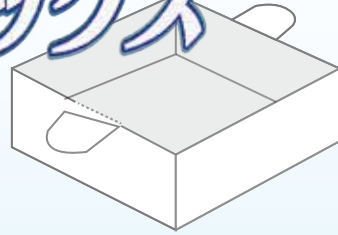

必要な時に清潔な空間を  
作りだせる紙製滅菌ボックス

※写真は使用時のイメージです。

新発売



使用シーン

IVR, 救急、創処置や CV 挿入、  
外来小手術などでの清潔野の確保

事前準備の見直しを行うことで、  
業務効率の改善が可能

特願 2021-179585

特許出願中



本製品は大阪大学次世代内視鏡治療学（中島清一先生）  
および放射線医学（東原大樹先生）との共同開発品です。

## 製品特長

- カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備出来る
- 滅菌状態でも展開時の1/10の厚みで保管出来る
- 滅菌ドレープの様な平面の清潔野ではなく、  
立体の清潔野をつくりだすことが出来る

平面の清潔野  
(滅菌ドレープなど)



立体の清潔野  
(SSボックス)



## 組み立て時の寸法




## 使用手順


※清潔に展開するために、ウィング以外には触れないようにしてください。

※生理食塩水は入れられません。


ウィング

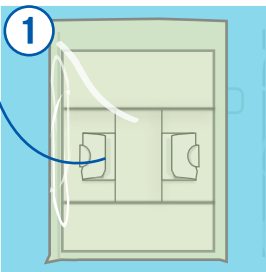


SSボックスを用意する。

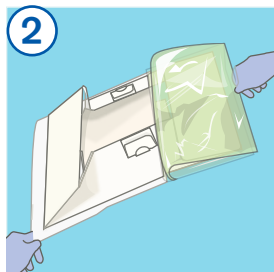


滅菌バッグから清潔に取り出す。

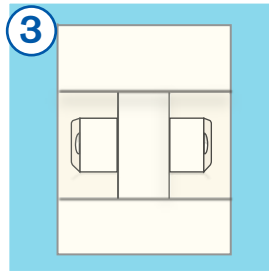


清潔な設置場所に置く。

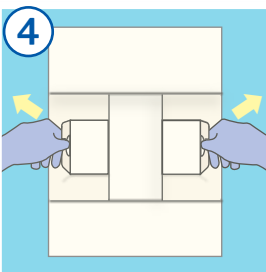


左右のウィングを矢印の方向に  
均等な力で引っ張り、  
ボックスを立ち上げる。

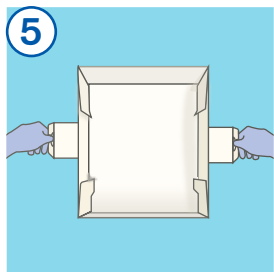

立ち上げ完了。

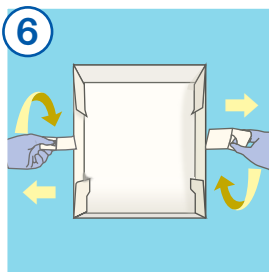

ウィングをねじりながら  
均等な力で引っ張り、  
ボックスから切り取る。

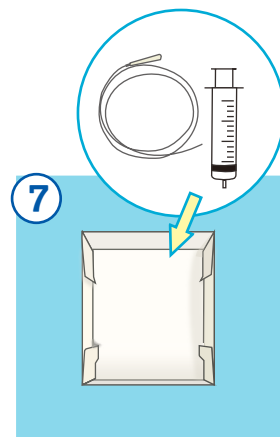

箱に物品を入れてご使用ください。

品番	規格	包装	サイズ/包装	1梱入数	サイズ/ケース	JANコード
1490550	300 mm × 360 mm 1枚滅菌	10袋 / 箱	W360 × D470 × H90 mm 1,100g	5箱	W508 × D387 × H410 mm 6,4kg	4 958286 081649



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320