

大阪市立大学医学部附属病院
中央材料部との共同開発!!

鋼製小物の固定に!!

滅菌の質保証の向上に!!

鋼製小物の
サイズ計測に
ご使用ください。

(1目盛: 1cm)


【鋼製小物固定シート】 未滅菌

こていするソウ

鋼製小物を固定できるポリプロピレン素材のシート

製品特長

- ポリプロピレン素材で、耐水性や強度に優れています。
- 折り返し部分には、サイズ調整ができるように折り目を入れています。
- 約12cm～15cmの鋼製小物サイズに適しています。
- 鋼製小物のボックスロック部を開いて固定、視認できます。
- 先端の鋭利な部分が見えませんが安心です。
- 中心にインジケータカードの差し込み口を設けていますので、必要に応じてご使用することができます。
- 滅菌後、鋼製小物をそのまま引っ張り出して簡単に抜くことができます。

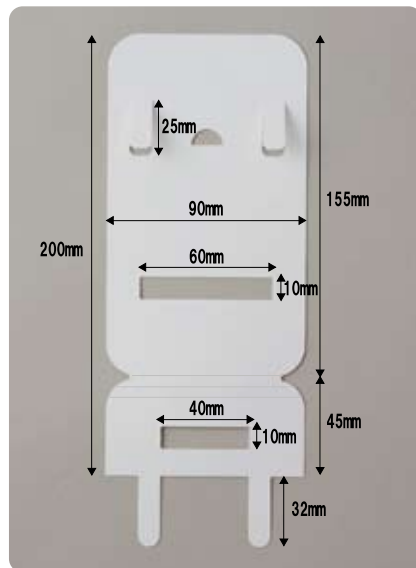

※本製品自体にはインジケータはございません。

品番	規格	サイズ	包装	1箱入数	JANコード
1720010	0920	幅90mm×長さ200mm	200枚×5束/箱	1箱	4958286709031

※詳細は、各営業窓口までお申し出ください。


使用方法



シートを準備します。



シートをセットし、赤枠のようにリングに台紙を入れ込みます。

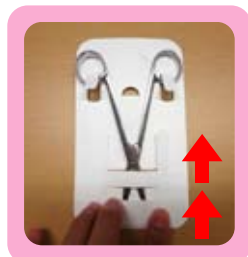

シートの下部分を内側に折り返していきます。



折り込んだ後、赤枠の先端を穴に入れていきます。



インジケータ無

鋼製小物をセットした後、必要に応じて、インジケータカードを差し込むことができます。



インジケータ差し込み口

インジケータを切り込み口にセットしてご使用頂けます。

インジケータカードをセット後、滅菌バッグに入れていけば完了です。



滅菌後、開封する時は??

滅菌後、開封する時は、指を入れ、そのまま引っ張り出せば、鋼製小物だけ抜くことができます。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009