

滅菌プレートG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したものに、X線で検知できる糸を取り付けたものである。微小繊維状セルローズで表面加工を施したものもある。また、酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行ったものである。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋より取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意

- **1. 体内に留置しないこと。
- 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

**<http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)