

滅菌ガーゼ巻きコットンG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

**脱脂綿やガーゼとX線造影材の組み合わせからなり、成形や縫製や表面加工によって一体化したもので、更に酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム(造影剤) ・スチレン系エラストマー(固定材) ・TET 5MA636 GRN(着色剤)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- 体内に留置しないこと。
 - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後、速やかに使用すること。
 - 糸を強く引っ張らないこと。
 - 製品を分解して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- ** <https://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

ガーゼ巻きコットンG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。

[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]

3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿をガーゼで包み込み、端を糸で結んだもので、X線で検知可能な成分を含むものである。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム (造影剤) ・スチレン系エラストマー (固定材) ・TET 5MA636 GRN (着色剤)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

**使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

**1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行うから使用すること。

4. 糸を強く引っ張らないこと。

5. 製品を分解して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

**<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)