

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

## ハクゾウ滅菌ラパットG (ヒモ付)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- \*\*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- \*\*3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて縫製したもので、X線で検知できる糸及び柄を取り付けている。  
本品は酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行っている。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム (造影剤) ・スチレン系エラストマー (固定材) ・TET 5MA636 GRN (着色剤)

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\*1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。
- \* 4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
\*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- \* <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)