



Design Your Voice
Hakuzo

ハクゾウ

滅菌オペガーゼNEOクロス

[一般医療機器] X線造影材入りガーゼ 届出番号：27B2X00243000023
販売名：ハクゾウ滅菌オペガーゼNEO


単回使用

滅菌済


2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、
より視認性を向上させたEOG滅菌済のガーゼです。



特殊折りガーゼ 折り方

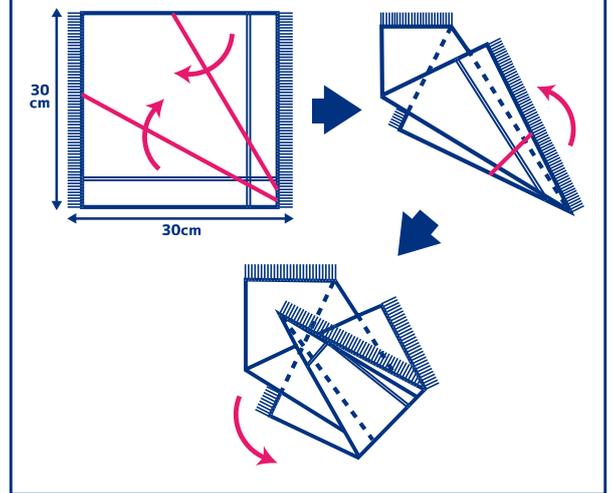

《X線造影糸の比較写真》

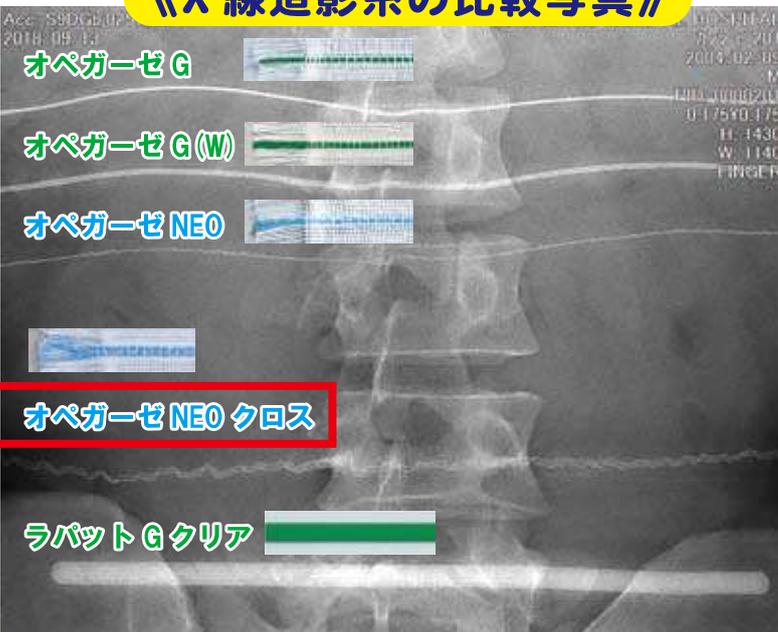

2組重ねの青色X線造影糸が、縦側と横側の2方向にクロスさせています。

**業界初!!
X線造影糸
4本入り。**

【製品特長】

- ◎新しい製造手法で、品質を向上させた手術用ガーゼです。
- ◎EOG滅菌済です。
- ◎2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせている為、従来のX線ガーゼよりも造影糸が抜けにくく、視認性に優れております。
(業界初のX線造影糸4本入りガーゼです。)

※体の下に各種ガーゼを置いて、レントゲン撮影を行った時の写真となります。

ハクゾウメディカル株式会社

**2019年5月改訂(第4版)

*2016年4月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号：27B2X00243000023

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ JMDNコード32374000

ハクゾウ滅菌ペガーゼNEO

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
3. 電気メス等を近付けないこと[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

**綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X線で検知できる糸を織り込んだものである。
またそれに柄を付けているものもある。
本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

【X線造影材】

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム(造影剤) ・ポリプロピレン(固定材) ・ウルトラマリン(着色剤)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

使用目的に応じ滅菌袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- *1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- *2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- * <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。
<http://www.pmda.go.jp/>

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1156310	特殊折り 10枚	30cm×30cm	10枚/袋 ×10袋	6箱	 4 958286 712154
1156401	4折 10枚	30cm×30cm	10枚/袋 ×20袋	6箱	 4 958286 081632
1156403	4折 30枚	30cm×30cm	10枚/袋 ×30袋	6箱	 4 958286 719856
1156420	4折 20枚	30cm×30cm	20枚/袋 ×10袋	6箱	 4 958286 712130

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118