

創傷保護用吸収パッド

ハクゾウ 一般医療機器

滅菌ラップキュアドレッシング

滅菌済

HAKUZO STERILE WRAP CURE DRESSING

固着しにくいフィルムと吸収性コットンシートを組み合わせた
EOG滅菌済の創傷保護用吸収パッドです。

50袋入



50mm×50mm

100mm×100mm

製品特長

使用方法



1 取り出し口のミシン目を破り滅菌袋を取り出します。



2 滅菌袋を開封し、創傷面などに製品をあててください。

適用範囲

◎比較的浸出液の少ない創傷。

※浸出液の多い創傷には適用できません。

対象施設

◎医療・介護施設


◎在宅 など

1 固着しにくいフィルム使用

パッドの表面には、患部とくっつきにくいポリエチレンネットを使用しています。

2 湿潤環境

穴あきのポリエチレンネットにすることにより、浸出液を医療脱脂綿が吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。

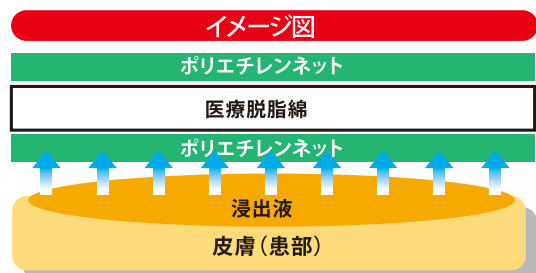

3 滅菌済

1枚ずつEOG滅菌されていますので、清潔にご使用頂けます。また、2種類からお選び頂けます。




傷あてパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド:脱脂綿の両面にポリエチレンネット

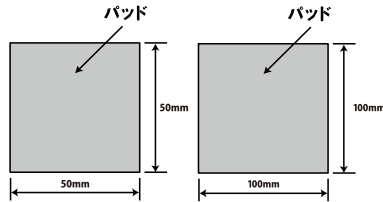

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、パッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに取りかえること。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
4. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウン

ロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。

<https://www.hakuzo.co.jp/>

品番	写真	規格	包装	1 梱入数	JANコード
3155131		50mm × 50mm	50袋 / 箱	12箱	4 958286 705576
3155132		100mm × 100mm	50袋 / 箱	12箱	4 958286 705583

※詳細は各営業にお問い合わせください。

未滅菌タイプも販売しています。

ハクゾウ 創傷保護用吸収パッド 一般医療機器
ラップキュアドレッシング 未滅菌

1巻入

幅 75mm × 全長 5m

No.75




1巻入

幅 150mm × 全長 5m

No.150

ロールタイプなので自由な長さにカットできます。

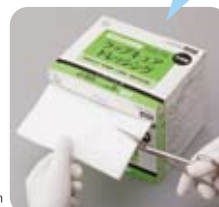

ロール状になっているので、患部にあったサイズにカットできます。



箱に定規を印刷しています。(最大8cmまで)

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320