

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN コード 70975000

裁 断 綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%からなる繊維をパッド状にしたものである。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

- * 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- ** 1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所保管すること。
- ** 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
* 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
* <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)