

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 止血用押圧器具 JMDN コード 70617000

ハクゾウ滅菌タブレット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- * 綿 100%を円盤状に圧縮整形したものである。また、カルメ
ロースナトリウムで表面加工したものや、中心部にシリコン
ラバーやポリエチレン等の被覆材を付けたものもある。
本品は酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行っている。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨
動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器
具をいう。

【使用方法等】

製品を無菌的に取り出し、止血部分に圧迫止血できる程度に
おさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- * 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な
場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
*<http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)