

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 止血用押圧器具 JMDNコード 70617000

ハクゾウ滅菌SPコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維で楕円筒状に加工し、酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

製品を無菌的に取り出し、止血部分に圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

- * 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)