

医04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

## エレバン

再使用禁止

(滅菌済医療機器)

### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴のある患者への使用は禁止。

### 【形状、構造及び原理等】

粘着テープ：ポリ塩化ビニル製フィルム、ゴム系粘着剤

パッド：不織布、ポリエチレンネット

\*\* セパレータ：紙

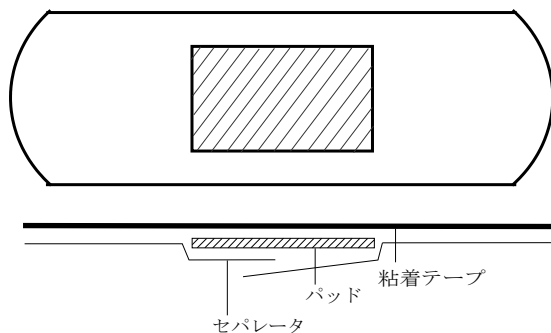

種類	サイズ	1箱入数
No. 100M	19mm×72mm	100枚
No. 200M	19mm×72mm	200枚
No. 300L	25mm×72mm	100枚

### 【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷面の被覆及び保護

### 【使用方法等】

傷口とその周辺を清潔にし、パッドに触れないようにして、セパレータをはぎ取り、パッドを傷口に当て粘着部分で皮膚に固定する。

### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し医師に相談してください。

2. 本品の使用は1回限り、再使用しないこと。
3. 滅菌済ですので、個包装を破損しないようにご注意ください。
4. 包装開封後、速やかに使用すること。
5. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
6. 1日に2～3回貼り替えること。
7. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼り替えること。
8. 粘着面を患部に貼らないこと。
9. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
10. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。

#### 2. 有効期間

\*\* 本品の容器に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

阿蘇製菓株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

\* TEL 03-5422-3365