

# ELEBAN BLOCK

## エレバンブロック

### 防水性サージカルドレッシング

一般医療機器 救急絆創膏



届出番号 43B2X00005000077

EOG滅菌済



ポリウレタンの透明フィルムを使用した  
防水タイプのサージカルドレッシング

## 特長

### ●ポリウレタンフィルム

水や細菌の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透過性を備えています。

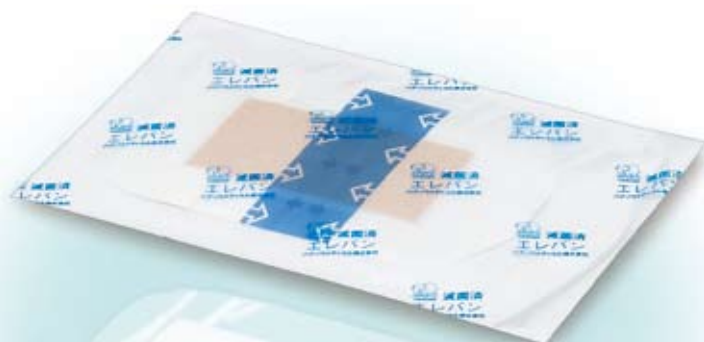
しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。

### ●吸収パッド

レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。

### 主な使用用途

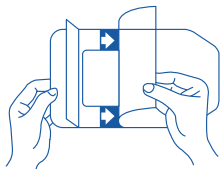
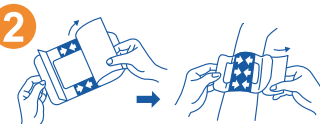

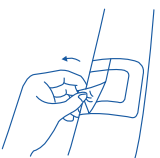
- CVCカテーテル固定
- 創傷部保護
- シャワー・入浴時の防水



ポリウレタンフィルム

レーヨン不織布＋  
固着防止ネット

●使用方法

<p><b>1</b></p>  <p>裏面の剥離紙の大きい方をゆっくり剥がしてください。</p>	<p><b>2</b></p>  <p>穿孔部等に貼りながら残りの剥離紙をゆっくりと剥ぎとってください。フィルムの縁を念入りに押さえ確実に貼りつけてください。</p>	<p><b>3</b></p>  <p>固定テープの中央の矢印(⇔)(どちらからでも剥がせます)からゆっくり剥がしてください。</p>	<p><b>4</b></p>  <p>残りの補助フィルムを残った矢印(←)の方向へゆっくり剥がしてください。</p>
--	--	---	--

2009年8月20日作成(第1版)

届出番号 43B2X00005000077

医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

## エレバンブロック

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

パッド：不織布、ポリエチレン  
粘着テープ：ポリウレタン、アクリル系粘着剤

**【使用目的、効能又は効果】**

創傷面の保護

**【品目仕様等】**

滅菌済医療機器

**【操作方法又は使用方法等】**

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

**【使用上の注意】**

・重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置を変えること。
- 3) パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくとう傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

**1.貯蔵・保管方法**

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2.有効期間・使用の期限**

未開封の状態では5年間[自己認証(自社データ)による]

**【包装】**

- ・No. 50 (50mm×70mm) 50枚入
- ・No. 60 (60mm×90mm) 50枚入
- ・No. 80 (80mm×120mm) 30枚入
- ・No.100 (100mm×150mm) 30枚入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】**

製造販売者：リバテープ製薬株式会社

住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45  
電 話：0120-199-189

製 造 者：リバテープ製薬株式会社


住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45

**【販売業者の氏名又は名称及び住所】**

販 売 者：ハクゾウメディカル株式会社

住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話：06-6942-0451(代)

添付文書が必要な場合はお申し出ください

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155021	No.50	5cm×7cm(パッド2cm×4cm)	50枚/箱	20箱	 4 958286 701318
3155023	No.60	6cm×9cm(パッド3cm×6cm)	50枚/箱	20箱	 4 958286 701325
3155025	No.80	8cm×12cm(パッド4cm×8cm)	30枚/箱	20箱	 4 958286 701332
3155027	No.100	10cm×15cm(パッド5cm×11cm)	30枚/箱	20箱	 4 958286 701349

※詳細は各営業にお問い合わせください。



### ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 本社営業部 ☎06-6809-4318  | 京都営業所 ☎075-603-4826   |
| 東京支店 ☎03-3522-6720   | 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045  | 広島営業所 ☎082-849-4188   |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900  | 四国営業所 ☎0875-52-6900   |
| 神戸支店 ☎078-976-8901   | 北九州営業所 ☎093-617-3911  |
| 仙台営業所 ☎022-399-7091  | 福岡営業所 ☎092-481-5921   |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253   |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447  | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320   |
| 三重営業所 ☎059-350-3844  |                       |