

医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000  
(一般医療機器 止血用押圧器具 JMDN コード 70617000)

## エレバンプレスタットEX

### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止


### 【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ウレタン不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコーン樹脂

パッド：ポリエチレン/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、セルローススポンジ、ポリアミド、ポリエステル

本品は滅菌済みである。

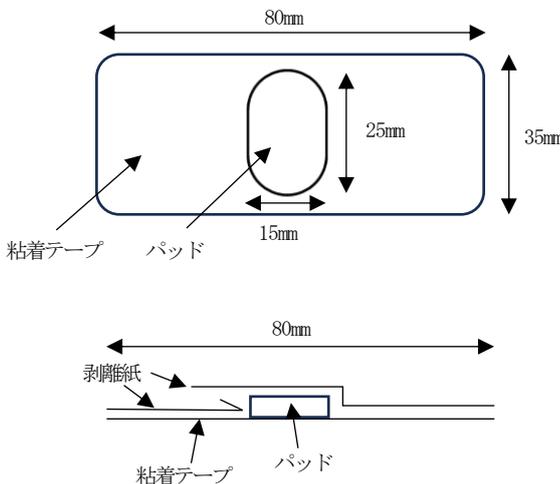

### 【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等、及びカテーテル挿入部位や注射針等の穿刺部を圧迫止血するために用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 包装を開いて本品を取り出す。
- 2) 針又はカテーテルを抜く直前に、パッド長径が血管の走行に一致する向きで血管刺入点にパッドを当て、軽く仮止めする。
- 3) パッドに軽く指をそえながら、針又はカテーテルを抜く。抜去と同時に、そえていた指でパッドを強めに圧迫する。
- 4) パッドを圧迫しながら、片方ずつ粘着テープ部を1cm程度引き伸ばし、はがれないように皮膚に貼付する。

### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液

などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

- 3) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 包装開封後、速やかに使用すること。
- 8) テープを必要以上に伸ばして貼ると、皮膚刺激の原因となるので注意すること。
- 9) 血管や皮膚の損傷をさけるため、必ず針又はカテーテルを抜いてから貼付すること。
- 10) 本品は貼付してから2時間を目安にはがすこと。
- 11) はがしたときは、止血していることを必ず確認すること。止血が不十分だった場合は、用手圧迫止血等の適切な処置を行うこと。
- 12) はがしたあとは、穿刺部を救急絆創膏等で保護すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)