

単回使用

一般医療機器 届出番号27B2X00243000155

穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏

エレバンプレスタット®ミニ ジェントル

ELEBAN PRESTAT® MINI GENTLE

滅菌済

静脈穿刺・採血時の被覆保護に

点滴関節穿刺時の被覆保護に

100枚入



【サイズ】

- 粘着フィルム: 36mm×36mm
- パッド: φ 16mm 厚み約2mm

【素材】


- 粘着テープ: ポリエステル不織布、
アクリル系粘着剤
- 剥離紙: 紙、シリコン樹脂
- パッド: 不織布



製品特長

①粘着面を線引き加工しています。

粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。

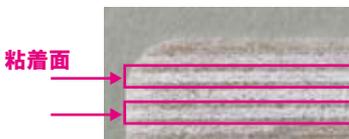

粘着面を線引き加工

スキントラブルの低減

製品特長

②ツマミ部分で、剥がし方も簡単です。

粘着面がないツマミ部分がありますので、容易に剥がすことができます。



剥がしやすい糊無し部分があります。

スキントラブル低減
患者様の利便性向上

製品特長

③剥離紙が滅菌紙にくっついてます。

剥離紙と滅菌紙が一緒になっているので、使い勝手が良く、清潔操作やゴミの減量化が可能です。

剥離紙と滅菌紙が一体
となっています。
●3アクションでの貼付
●ゴミの減量化
●清潔操作




使い勝手の向上！
ゴミの減量化

剥離紙が滅菌紙にくっついています。

エレバンプレスタット®ミニ ジェントル


使用方法

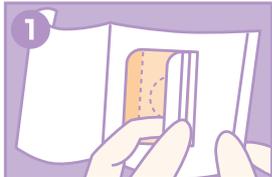


袋を開封し、テープの端にある剥離紙とテープをもち、台紙からはがします。



穿刺部にパッドを当て、剥離紙を持ったまま貼付してください。

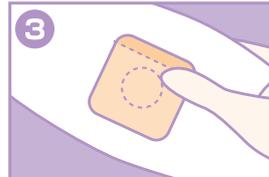

剥離紙をはがし、テープ全体をよく押さえ、貼付してください。

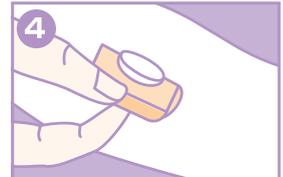

はがす際はテープをつまみ、皮膚からはがしてください。

2020年1月作成（第1版）

医04 整形用品

届出番号 27B2X00243000155

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

エレバンプレスタット®ミニ ジェントル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコン樹脂

パッド：不織布

本品は滅菌済である。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- 3) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 包装開封後、速やかに使用すること。
- 8) 本品は貼付してから2時間を目安に剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
<https://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451 (代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。

<https://www.pmda.go.jp/>
<https://www.hakuzo.co.jp/>

品番	サイズ	規格	箱サイズ(mm)/重量	1梱入数	ケースサイズ(mm)/重量	JANコード
3155087	36mm×36mm (パッド Φ16mm)	100枚入	W280×D65.5×H50 95g	40箱/ケース	W576×D291×H277 4.4kg	4 958286 716053

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320