



Design Your Voice
Hakuzo

一般医療機器

穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏

エレバン プレスタット[®]ミニ EX

■ ELEBAN PRESTAT[®] MINI EX ■

滅菌済

静脈・採血・点滴・関節穿刺時に使用するパッド付き被覆保護材です。




S サイズ



M サイズ

使用用途

静脈穿刺・採血時の被覆保護に
点滴・関節穿刺時の被覆保護に

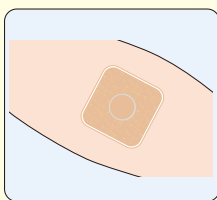

実寸大

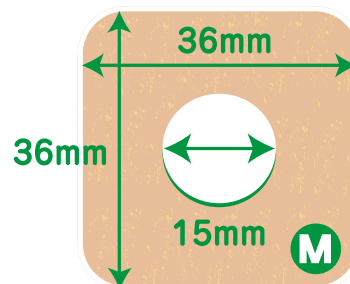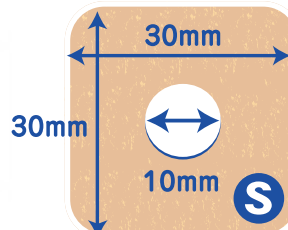

製品特長

●しっかり固定！

通気性と粘着性に優れたテープを使用しています。

●止血後の保護に最適！

パッドは5層構造！吸収性に優れ、
穿刺部をしっかり保護します。

●ゴミの削減！

剥離紙が滅菌紙にくっついているため、貼りやすく、
ゴミの削減になります。

●使いやすい！

ツマミがあるので簡単に剥がすことができ、
スキントラブルの軽減・患者様の利便性向上に繋がります。

ツマミがあるので
剥がしやすい

伸縮性に優れた低アレルギー性
のアクリル系粘着材を使用




テープ面




パッド面

不織布素材の適度な厚みのある
吸収性に優れたパッド


使用 方 法

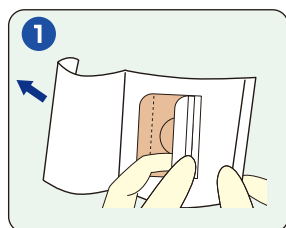


1 袋を開封し、テープの端にある剥離紙とテープをもち、台紙からはがします。

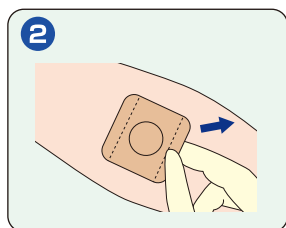

2 穿刺部にパッドを当て、剥離紙を持ったまま貼付してください。

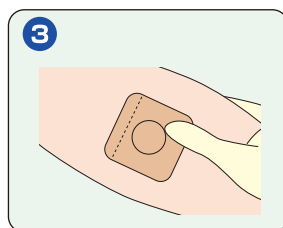

3 剥離紙をはがし、テープ全体をよく押さえ、貼付してください。

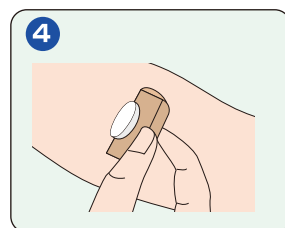

4 はがす際はテープをつまみ、皮膚からはがしてください。

2016年1月作成(第1版)(新記載要領に基づく作成)

届出番号 27B2X00243000148

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

再使用禁止

エレバンプレスタットミニ EX

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着フィルム：レーヨン不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコン樹脂

パッド：ポリエステル・レーヨン・ポリプロピレン・
ポリエチレン不織布

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着フィルムで固定して使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- 3) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 粘着面を患部に貼らないこと。

5) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。

6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

7) 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451 (代)

品 番	規 格	サイズ	包 装	1 梱入数	JANコード
3155068		 粘着部 30mm×30mm パッド部 Φ10mm	100枚入	40箱	 4 958286 081281
3155069		 粘着部 36mm×36mm パッド部 Φ15mm	100枚入	40箱	 4 958286 081298

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320