

Transparent Dressing Tape



Design Your Voice

Hakuzo

エレバンロール ELEBAN ROLL

未滅菌

ラテックスフリー

透明フィルムを使用したロールタイプの
防水性ドレッシングテープ



ハクゾウメディカル株式会社

製品特長

● 伸縮性

しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。

● 防水性・バリア性

外部からの汚染を減らします。

● 透過性

水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。


● 経済性

必要な長さにカットして使用でき経済的です。

使用用途

- ドレッシングの固定
- 入浴・シャワー
- チューブ・カテーテルの固定

使用方法

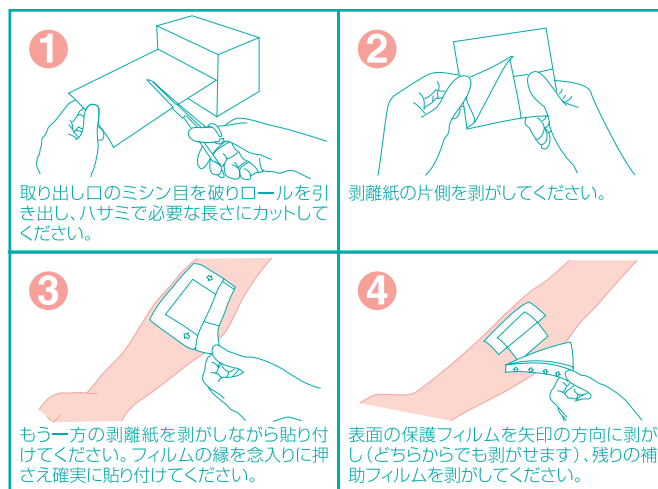

● 使用上の注意

- 貼付部位の皮膚は清潔にして、乾いた状態で使用すること。
- 直接創傷部に貼らないこと。
- シャワー時には、フィルムが皮膚に密着していることを確認の上で行うこと。
- 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

- 長時間に及ぶ貼付は避けること。
- フィルムを強く引っ張った状態で貼付しないこと。

● 保管上の注意

- 水濡れに注意し、直接日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155041	No.50	5cm×10m	1巻/箱	20箱	4 958286 701516
3155043	No.75	7.5cm×10m	1巻/箱	20箱	4 958286 701523
3155045	No.100	10cm×10m	1巻/箱	20箱	4 958286 701530
3155047	No.150	15cm×10m	1巻/箱	10箱	4 958286 701547

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320