

分娩監視装置用ベルト ハートミーベルト

- 1 穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能
- 2 装置をきちんと固定できる幅広ベルト
- 3 清潔な個人用ベルト

2本入

ピンク1本
ブルー1本

Size: 60mm×1.25m



こんなお困りの声に!

夏場、汗でベルトが
湿っている場合が
ある!

他人の肌に直接
触れたベルトは
気になる...

洗濯などの
管理が大変!

血液やゲルの汚れが
付いてしまって取れない

使い回すのは妊婦さま
に申し訳ない...

ハートミーベルトで解決!

妊婦さまの不快感解消

スタッフさまの負担軽減

産婦人科での感染対策に!

分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を
妊婦さまの腹部に固定する際にご使用いただけます



製品特長

- ♥ 穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能
- ♥ 装置をきちんと固定できる幅広ベルト
- ♥ 2色のベルトでかけ間違い防止
- ♥ 薄くて肌ざわりのよいやわらか素材
- ♥ 清潔な個人用ベルト
- ♥ 安心なラテックスフリー素材

使用方法

ハートミーベルトをねじれないように妊婦さまの腰部で一周させ、トランスジューサの突起部分をベルトの穴に通して、装着してください。

meetuuからの想い

『ハートミーベルト』という製品名は、このベルトを用いて観察する「赤ちゃんの心拍」と「お母さんの子宮収縮」から連想した、「heart:心」と「tummy:おなか」が由来となっており、2人の結びつきがより一層強くなるようにという想いを込めました。定期健診や分娩時に、ベビーの成長と共に使っていただけますので、生まれる前から生まれる瞬間まで、ママとベビーを見守るベルトになればと願っています。

取り扱い上の注意

- 蛍光増白剤入りの洗剤の使用は避けてください。
- 直射日光、高温・多湿を避けて保管してください。

洗濯表示



洗濯ネット使用

製品情報

品番	品名	規格	包装	素材	JANコード
3147813	meetuu ハートミーベルト	60mm×1.25m	2本入（ピンク1本 ブルー1本）	ポリエステル 74% ポリウレタン 26%	 4 958286 712499

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
仙台営業所 TEL:022-393-7434
関東営業所 TEL:03-5809-4780
西東京営業所 TEL:042-646-0451
三河営業所 TEL:0564-54-5447

三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
神戸営業所 TEL:078-940-8975
広島営業所 TEL:082-849-4188
四国営業所 TEL:0875-52-6900
福岡営業所 TEL:092-481-5921

北九州営業所 TEL:093-617-3911
熊本営業所 TEL:096-345-2253
札幌駐在所 TEL:011-788-8009
盛岡駐在所 TEL:019-613-2176
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
山陰駐在所 TEL:0859-30-2192
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320