

「うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会
看護工学プロジェクト委員会」のニーズから生まれた製品です。

ママらくfitソックス

お腹が大きい妊婦さんでも履きやすいスパイラル着圧の弾性ソックスです。

長時間
着用しやすい
締め付け感

【効能・効果】
装着部位の血行促進、
あしのムクミの軽減

ふくらはぎ
11hPa

安全な
すべり止め付き

足首
18hPa

足底
24hPa



※ネイビー

特長1

スパイラル着圧設計[※]になっており、リンパや静脈を締め付けずスムーズに脱ぎ履きができます。妊娠32~36週の妊婦さんの約9割が履きやすいと評価しています。(2019年自社調査結果)

※岡本(株)独自のスパイラル着圧設計 特許第5721972号取得

特長2

強すぎない心地よい着圧値で長時間履き続けやすくなっています。人間工学に基づいた黄金比率着圧仕様

足底：足首：ふくらはぎ = 2.2：1.6：1

※膝下におけるちょうど良いと感じる圧(日本繊維製品消費科学会)


特長3

足裏のすべり止め仕様により、妊婦さんでも安全に使用できます。

着用方法

※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏の「左」「右」の目印をご確認の上、着用ください。

- ①ソックスをちぎりとよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部の左右マークがすね部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、ちぎみやしわがないように微調整してください。

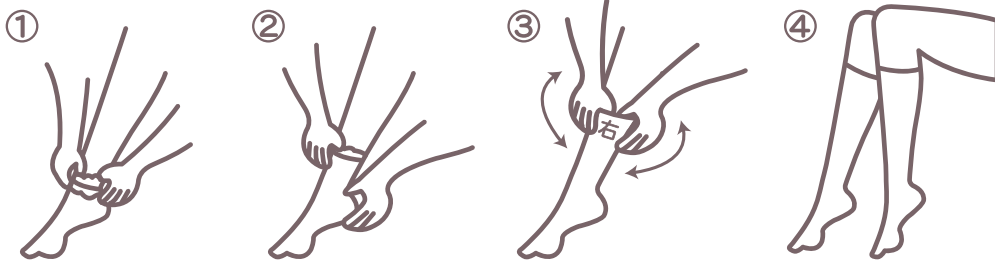

洗濯時のご注意：添付文書をご確認ください。

サイズ

より効果的に着用頂くために下記のサイズで着用ください。

測定部位	周囲長
ふくらはぎ	32~38cm
足首	19~23cm



2規格あり、ラベルごとに規格を表記しています。



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3000079	ネイビー 21-23cm 1足入	1箱	10箱×4中箱	4 958286 715919
3000080	ネイビー 23-25cm 1足入	1箱	10箱×4中箱	4 958286 715926

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL:06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320