

弾性ソックス spr |

【警告】

適用対象(患者)

次の疾患と診断された方は、使用前に医師にご相談ください。

- 1) 深部静脈血栓症。
[肺血栓塞栓症を起こすおそれがあるため。]
- 2) 動脈血行障害、うっ血性の心不全及び下肢に炎症性疾患・化膿性疾患・創傷のある方。
[圧迫により症状を悪化させるおそれがあるため。]
- 3) 装着部位に神経障害のある方。
[血行障害等を起こしても認識できない可能性があるため。]
- 4) 糖尿病。
[無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
- 5) 繊維に対して過敏症のある方。
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】


適用対象(患者)

- 1) 重度の動脈血行障害、うっ血性の心不全及び有痛性青股腫の方。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 2) 感染性静脈炎の方。
[菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため。]
- 3) 装着部位に極度の変形がある方。
[適切な圧迫圧が得られないため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は糸が筒状に編み上げられた形状である。弾力性のある糸により、抹消部から中枢部にかけて圧迫圧が漸減する構造である。

部位	圧迫圧
足底	24hPa (18.0 mm Hg)
足首	18hPa (13.5 mm Hg)
ふくらはぎ	11hPa (8.2 mm Hg)

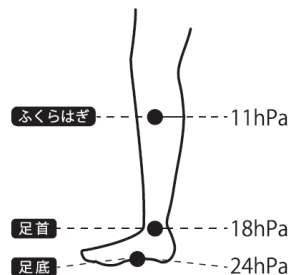

2. 形状及びサイズ


形状：膝下ハイソックス

サイズ：下表のとおり

足底長	21~23cm	23~25cm
足首周囲	19~23cm	
ふくらはぎ周囲	32~38cm	

<計測位置>

- ① 足底長：つま先から踵までの長さ
- ② 足首周囲：最も細い部分
- ③ ふくらはぎ周囲：最も太い部分

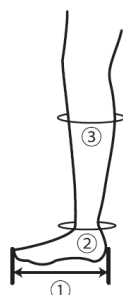

3. 素材

綿、ナイロン、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。


【使用方法等】

1. 準備

- 1) 各計測位置を計測し、サイズ表にて正しいサイズを選択すること。
- 2) 本品は、左右編み分けているため、ロゴム部裏の「右」「左」の目印を確認すること。

2. 装着方法

- ① ソックスをたぐりよせて、つま先を入れる。
- ② 足首まで引き上げ、踵の位置を合わせる。
- ③ ロゴム裏部の右左マークが脛部の中央になるよう調整しながら引き上げる。
- ④ 膝下まで引き上げ、たるみやしわのないように微調整する。

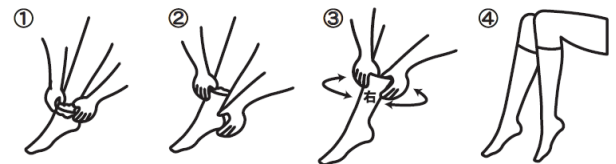

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 1) ギブス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある場合は、潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意して使用すること。
- 2) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
[動脈および静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。]

2. 重要な基本的注意

- 1) 本品を折り返して装着したり、2枚重ねて装着したりしないこと。
[血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。]
- 2) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着すること。また、本品が装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずれ落ちたり、誤った位置に装着されている場合には必ず手順の始めから正しく装着し直すこと。
- 3) 適正な圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズのものを選択すること。また、サイズ適応外の場合には使用しないこと。
- 4) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合には、適切なサイズに変更すること。
- 5) 本品に破損(伝線、ほつれ、破れ等)がないことを確認してから装着すること。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないこと。

- 6) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意すること。
 - ①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着
 - ②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ④鋭利なものへの接触
- 7) 本品をはさみで切る等の加工、修理を行わないこと。
- 8) 軟膏等の薬品や油脂類が付着すると繊維が劣化するおそれがあるため、付着しないように注意すること。
- 9) 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないこと。
- 10) 就寝時は使用しないこと。

【不具合・有害事象】

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性がある。

1. 重大な有害事象
 - 1) 血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
 - 2) 神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
 - 3) 皮膚障害
本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
2. その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水泡、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れた場合も、同様に医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて、室温下で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗濯時の毛羽立ちを防ぐために裏返しにして、洗濯ネットを使用して洗濯すること。
2. 漂白剤（塩素系・酸素系）は使用しないこと。
3. 水洗いを十分に行うこと。
4. 白・淡物とは分けて洗濯すること。
5. 素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・変色することがあるので、注意すること。
6. 乾燥機は使用しないこと。
7. ロゴム部を上にして、形を整えて陰干しすること。
8. 特殊な編み構造のため、洗濯後しわが発生する場合があるが、使用上の支障はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
<https://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)