

Santa Set

サンタセット

新生児のおへそを処置するためのセットです



セット内容

- サージョン(折りたたみガーゼ)7.5cm×5cmタイプII 8ply ... 10枚
- サージカルテープ12.5mm巾 ... 1巻
- 綿棒 紙軸両綿付 長さ7.5cm ... 10本
- ホワイトパワーB(ベンザルコニウム塩化物溶液) ... 1ケ
- マミーサラットA(酸化亜鉛) ... 1ケ

※部材内容につきましては、ご要望に応じて対応させていただきます。




使用方法例

- ① おへそが落ちていない場合
おへその局所をホワイトパワーB(殺菌・消毒液)で消毒し、その後マミーサラットA(傷口乾燥用散布材)を散布して、ハクゾウサージョン(傷口等の手当用ガーゼ)をあて、サージカルテープで固定してください。
- ② おへそが落ちた場合
沐浴後、ホワイトパワーBを浸した綿棒で、局所を消毒し、マミーサラットAを散布して、ハクゾウサージョンをその上にあて、サージカルテープで固定してください。
- ③ おへそが落ちた後、傷が治るまで(分娩後約2週間)手当てをしてください。

※排便・尿などで、へそ部分が汚れた場合、その都度交換してください。
※おへそが飛び出たり、悪臭のする場合は医師又は薬剤師にご相談ください。

製品情報

品番	品名	包装	1梱入数	JANコード
1450077	meetuu サンタセット	1セット/箱	20袋×2箱	 4 958286 067148

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318	三重営業所 TEL:059-350-3844	熊本営業所 TEL:096-345-2253
東京支店 TEL:03-3522-6720	京都営業所 TEL:075-603-4826	札幌駐在所 TEL:011-788-8009
北大阪支店 TEL:072-653-4045	大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118	盛岡駐在所 TEL:019-613-2176
南大阪支店 TEL:0721-20-2900	阪神営業所 TEL:078-262-1634	北陸駐在所 TEL:076-225-8013
神戸支店 TEL:078-976-8901	広島営業所 TEL:082-849-4188	山陰駐在所 TEL:0859-30-2192
仙台営業所 TEL:022-393-7434	四国営業所 TEL:0875-52-6900	沖縄駐在所 TEL:098-941-5320
西東京営業所 TEL:042-646-0451	福岡営業所 TEL:092-481-5921	
三河営業所 TEL:0564-54-5447	北九州営業所 TEL:093-617-3911	