



ここ笑み
HAKUZO NURSING CARE

口腔ケア用綿棒

口腔ケア用綿棒


爽快綿棒ハーフ

介護用製品




片側巻綿タイプの
口腔ケア用綿棒です。


使用方法

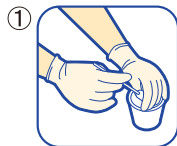


① 綿棒に水を含ませ、軽くしぼります。

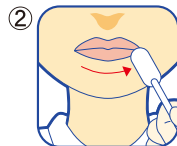


② 濡らした綿棒で唇に軽く触れ、片方の口角から口腔内に綿棒を入れます。

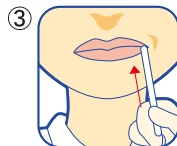


③ 上顎と下顎の接点の所まで綿棒を入れます。

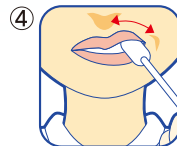


④ 綿棒を歯肉に沿って左右に動かし口腔前庭をキレイにしています。

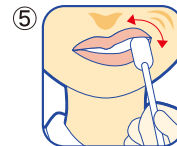


⑤ 次に口の周りや頬の筋肉を伸ばしながらほぐしていきます。

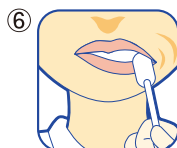

⑥ 下顎も同じように刺激し口腔内全体をきれいにします。

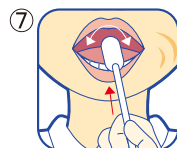

⑦ 口腔内の観察をし口蓋に半円を描きながら、或いは奥から手前に綿棒を動かしてケアします。

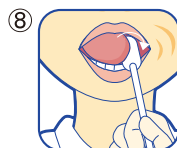

⑧ 舌の上をキレイにして中央から側面に沿わせ舌の下に移動し、唾液の分泌を促します。

製品情報

※詳細は各営業にお問い合わせください。

品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
1240012	爽快綿棒ハーフ	片綿付長さ 20.5cm	200 本 / 箱	20 箱	4 958286 303154



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
仙台営業所 TEL:022-393-7434
関東営業所 TEL:03-5809-4780
西東京営業所 TEL:042-646-0451
三河営業所 TEL:0564-54-5447

三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
神戸営業所 TEL:078-940-8975
広島営業所 TEL:082-849-4188
福岡営業所 TEL:092-481-5921
熊本営業所 TEL:096-345-2253

札幌駐在所 TEL:011-788-8009
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
高松駐在所 TEL:087-813-7416
松山駐在所 TEL:089-994-8649
鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320