
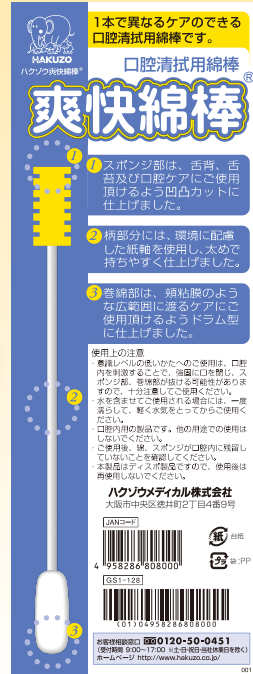


口腔清拭用綿棒

爽快綿棒

1本で異なるケアのできる
口腔清拭用綿棒です。

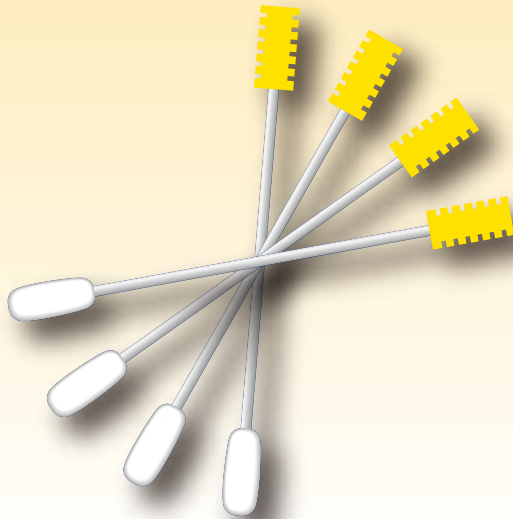

製品特長

- **スポンジ**
舌背、舌苔等をケアしやすくする為に凹凸カットしました。
- **軸**
太くて丈夫な紙軸を使用しています。
- **包装**
両端を触れず取り出せるように包装にはミシン目を入れました。
- **巻綿部**
頬粘膜のような広範囲のケアをしやすくする為ドラム型にしました。

使用方法

- ① 綿棒に水を含ませ、軽くしぼります。
- ② 濡らした綿棒で唇に軽く触れ、片方の角から口腔内に綿棒を入れます。
- ③ 上顎と下顎の接点の所まで綿棒を入れます。
- ④ 綿棒を歯肉に沿って左右に動かし口腔前庭をキレイにしています。
- ⑤ 次に口の周りや頬の筋肉を伸ばしながらほぐしていきます。
- ⑥ 下顎も同じように刺激し口腔内全体をきれいにします。
- ⑦ 口腔内の観察をし口蓋に半円を描きながら、或いは奥から手前に綿棒を動かしてケアします。
- ⑧ 舌の上をキレイにして中央から側面に沿わせ舌の下に移動し、唾液の分泌を促します。
- ⑨ 綿棒でのケアが終了次第、綿棒部分だけ折り曲げて捨てます。
- ⑩ さらにスポンジで同じ行程を行い、異なる刺激で口腔内をケアします。

製品情報

※詳細は各営業にお問い合わせください。

品番	品名	包装	1 梱入数	JAN コード
1240961	爽快綿棒	5 本 / 袋 × 20 袋 / 箱	10 箱	4 958286 808000



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 本社営業課 TEL:06-6809-4318 | 三重営業所 TEL:059-350-3844 | 札幌駐在所 TEL:011-788-8009 |
| 東京支店 TEL:03-3522-6720 | 京都営業所 TEL:075-603-4826 | 北陸駐在所 TEL:076-225-8013 |
| 北大阪支店 TEL:072-653-4045 | 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118 | 高松駐在所 TEL:087-813-7416 |
| 南大阪支店 TEL:0721-20-2900 | 阪神営業所 TEL:078-262-1634 | 松山駐在所 TEL:089-994-8649 |
| 仙台営業所 TEL:022-393-7434 | 神戸営業所 TEL:078-940-8975 | 鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925 |
| 関東営業所 TEL:03-5809-4780 | 広島営業所 TEL:082-849-4188 | 沖縄駐在所 TEL:098-941-5320 |
| 西東京営業所 TEL:042-646-0451 | 福岡営業所 TEL:092-481-5921 | |
| 三河営業所 TEL:0564-54-5447 | 熊本営業所 TEL:096-345-2253 | |