

現場の看護師が考えた製品です。

こんな方が使えます

- 自身でくつ下を履くのが不自由な方
- 妊婦、ヒザの曲げ伸ばしが不自由な方

など

スルっとはける君

(靴下を履くための補助具)

【材質】

下敷き:PP
洗濯はさみ:PP
ヒモ:アクリル

※製品サイズ/
下敷き:A4サイズ
(幅230×高さ310mm)
長ヒモ:2m
短ヒモ:20cm

靴下を下敷きに着け、洗濯はさみで靴下を挟むことで、つま先からかかとまで簡単に靴下を履くことができます。

使用手順

<p>1</p>  <p>洗濯はさみが付いている方を外側に して持ちます。 ※クリアファイル(ポリプロピレン製ファイル)</p>	<p>2</p>  <p>図のように内側に折ります。</p>	<p>3</p>  <p>反対側も折り、図のようにまとめます。 ※三つ折りにした時、洗濯はさみ下部を包み込む ように把持すると力の弱い患者様でも靴下を セッティングすることが容易となります。</p>
<p>4</p>  <p>靴下の中に入れます。</p>	<p>5</p>  <p>洗濯はさみを靴下の端(後面)にとめます。 ※少し浅めにとめた方が外れやすいです。</p>	<p>6</p>  <p>ひもの端を持ち足先へスルっとはける君 を設置します。 ※股関節の手術をした方は、脱臼部位をとらないように してください。</p>
<p>7</p>  <p>スルっとはける君の中に足を入れます。 ※手に巻きつけた方が、引き上げやすいです。</p>	<p>8</p>  <p>ひもを巻き取りながら引っ張ります。</p>	<p>9</p>  <p>完成です!!</p>

【使用上の注意】

- ご使用中に異常を感じられたら使用を中止してください。
- 目的以外の用途に使用しないでください。
- 破損等がある場合は、使用しないでください。

【保管上の注意】

- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

品番	包装	1梱入数	JANコード
2270300	1枚/袋	20枚/箱	4 958286 690001

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118