

# ハクゾウフェイスガード

飛散物から顔全体を防護する  
シールド交換式のフェイスガードです。

眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、  
眼鏡・N95マスクなどの上からも装着できます。

日本製

上部からの飛沫も防ぐ

眼鏡の上からもフィット

レギュラー

曇りにくい  
シールド  
採用

採用  
シールド

反射防止加工  
防曇加工

AR



Design Your Voice

Hakuzo

意匠出願中

# ハクゾウファインガード

# AR

## 10枚入

シールドが薄く軽量です。

防曇加工・反射防止加工がされているため、長時間の使用や穿刺などの処置時に適しています。

パソコン・電子カルテの使用時の映り込みや目の疲れを低減します。

PET 0.125mm  
(保護フィルム付き)



フレームに取り付ける際は、保護フィルムを取り外し、装着してください。



透過率 96%

※数値は代表値であり、保証値ではありません。

【反射の比較】着用者からの目線



ハクゾウファインガード

# レギュラー

50枚入

環境にやさしい再生PETシートを使用しています。

特殊加工により曇りにくく、日常的な短時間の使用に適しています。

PET 0.2mm



曇りにくい  
シールド  
採用

眼鏡の上からもフィット

上部からの飛沫も防ぐ

## AR・レギュラー共通方法



シールドに表裏があります。  
「HAKUZOU」の文字が外側から読めるように装着してください。

### 取り付け方法

レギュラー




AR



QRコードから  
ご確認頂けます。

### 取り外し方法

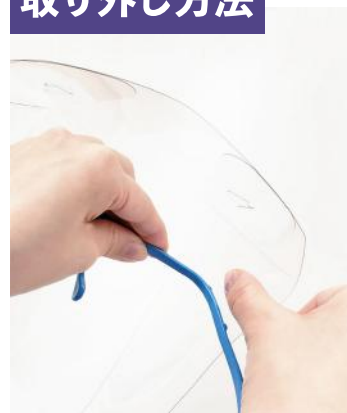

シールドの内側から穴近くを押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側を押し込むことで、汚染部分に触れずに取り外しできます。

シールドは使い捨てです。  
アルコール等で清拭すると透明度や防曇効果が劣化する可能性があります。

# フレームのみ

# ハクゾウファイナガード 30 本入



眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、  
眼鏡の上からも装着できます。

ブルー10本 / イエロー10本 / ピンク10本 (計30本入)

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3002799	セット レギュラータイプ	フレーム ブルー1本 シールド5枚	50箱	4 958286 717982
3002800	セット ARタイプ	フレーム ブルー1本 シールド5枚	50箱	4 958286 717883
3002801	フレームのみ (ブルー/イエロー/ピンク)	30本入 (各色10本)	12箱	4 958286 717890
3002802	フェイスシールドのみ レギュラータイプ	50枚入	15箱	4 958286 717906
3002803	フェイスシールドのみ ARタイプ	10枚入	100箱	4 958286 717913

※詳細は各営業にお問い合わせください。

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320