

ハクゾウファインガードセット レギュラー



PET 0.2mm

日本製

飛散物から顔全体を防護する
シールド交換式のフェイスガードです。

眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡・N95マスクなどの上からも装着できます。

曇りにくい
シールド
採用

フレーム1本 フェイスシールド5枚入



Design Your Voice

HAKUZO **Hakuzo**

環境にやさしい再生PETシートを
使用しています。
特殊加工により曇りにくく、
日常的な短時間の使用に
適しています。



シールドに表裏があります。
「HAKUZO」の文字が外側から
読めるように装着してください。



シールドは使い捨てです。
アルコール等で清拭すると透明度や
防曇効果が劣化する可能性があります。

取り付け方法



QRコードから
ご確認頂けます。

取り外し方法



シールドの内側から
穴近くを押し、
シールドを外します。
ゴミ箱の上で、
外側に触れず内側を
押し込むことで、
汚染部分に触れずに
取り外しできます。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3002799	セット レギュラータイプ	フレーム ブルー1本 シールド5枚	50箱	4 958286 717982

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320