

環境整備用ドライ不織布



Design Your Voice

Hakuzo

トイレに流せる

ハクゾウ フキタオル

20枚入

薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます



製品特長

- 薬液を注ぐだけでウェットタオルとしてご使用できます。(薬液量の目安は約 200mL となります。)
 - 使用後はトイレに流すことができます。
 - 【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】 の記入欄を設けています。
- ※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性やパルプの劣化の問題からお早めにご使用ください。

【記入欄】

調製者			
薬剤名			
注入日	年	月	日
使用期限	年	月	日

(サイズ：20 cm×30 cm) 素材:パルプ

使用方法

- ① 薬液を入れる場合は、シール口を剥がし薬液を注いでください。
- ② シール口を開けて、一枚ずつ取り出して使用してください。
- ③ ご使用後は、シール口を閉めてください。

使用上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- トイレに流す時は 1 回に 2 枚までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。

品番	サイズ	包装	1 梱入数	JANコード
3394071	200mm×300mm	20 枚 / 袋	36 袋	 4 958286 601151

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320

