

洗浄 & 除菌ワンステップ

長期保存



Design Your Voice
Hakuzo

環境除菌用 0.5% 加速化過酸化水素含浸クロス


ハイドロシールグリーン

便利なフック穴付き



※機械類などに使用する際は、その取扱説明書などで清掃方法をご確認の上、ご使用ください。

成分：水、過酸化水素、界面活性剤
サイズ：150mm×200mm
入数：100枚入

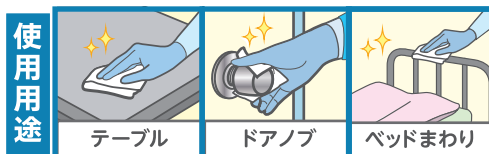

よく触れる環境表面の洗浄・除菌にご使用ください。

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなど
- 汚染物の付着した箇所

濃度が長期安定

長期間安定した濃度を保持します。未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能なため、廃棄リスクの低減につながります。

低残留性

ハイドロシールクリーンの主成分である「過酸化水素」は水と酸素に分解され、環境中に残留しません。※界面活性剤は残留します。

ハイドロシールクリーンの主成分である 0.5% 加速化過酸化水素は
下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。

「医療施設における消毒と滅菌のための CDC ガイドライン (2008)」

「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン 六訂版 (日本透析医会)」

「手術医療の実践ガイドライン (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会 [編])」

製品特長

長期保存可能

- **長期間安定した濃度を保持**
- **未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能。**

清潔

- **容器の使いまわしがなく、清潔に使用することが出来る。**

- 不織布を二つ折りにして、手のひらサイズでご使用いただけます。
- 除菌や汚染物の除去に効果を発揮します。(全ての菌を除菌または除去できるわけではありません。)
- 洗浄効果を有します。

含浸済なので、フタを開けて取り出すだけですぐに使えます！



注意事項

- 水洗トイレには流さないでください。
- 開封後は、しっかりと取り出し口のフタを閉め、なるべく早めにご使用ください。
- 液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
- 手荒れ防止の為、グローブを着用してからご使用ください。
- 人体の清拭には使用しないでください。
- 高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- フック穴は強く引っ張るとフィルムが切れて落下する場合があります。
- **合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。**
- **環境表面の材質により、変質・変色などの影響を与えるおそれがあります。**
- **繊維素材及び着色素材については、脱色・変色のおそれがあるので注意してください。**
- **ニスなどで塗装されている木製品などは、塗装が剥がれたり、変質・変色などのおそれがあります。**
- **金属を腐食させる場合があるので注意してください。**

酸性タイプ

まぜるな危険

● 塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。

● 必ず手袋を使用する。

● お子さまの手にふれないようにする。

● 液が目に入ったら、すぐに水で洗う。

品番	規格	包装	サイズ/包装	1梱入数	サイズ/ケース	JANコード
3940070	150mm×200mm	100枚入	W105×D260×H76mm	24個	W350×D460×H230mm	 4 958286 721019
			約420g		約12kg	



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマー課 ☎06-6809-4318
 東京支店 ☎03-3522-6720
 北大阪支店 ☎072-653-4045
 南大阪支店 ☎0721-20-2900
 仙台営業所 ☎022-393-7434
 関東営業所 ☎03-5809-4780
 西東京営業所 ☎042-646-0451
 名古屋支店 ☎052-769-6021
 三重営業所 ☎059-350-3844
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 阪神営業所 ☎078-262-1634
 神戸営業所 ☎078-940-8975
 広島営業所 ☎082-849-4188
 福岡営業所 ☎092-481-5921
 熊本営業所 ☎096-345-2253
 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 沖縄駐在所 ☎098-941-5320