

日本製



Design Your Voice
Hakuzo

感染性鋭利物廃棄容器

ハクゾウ安針BOX[®] 3.5L

針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。

フタの締め
忘れを防止!



安全に使用頂くための
目安となっています。



QRコードで
使用動画の
リンク

- ・ワンタッチクローズ式のフタ、スライドオープン式のフタ
- ・セーフティクローズ機能
- ・簡便な最終封
- ・スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応
- ・針付きシリンジを廃棄可能

再使用禁止

出願番号 2021-193202



安定供給のできる国内生産

特許出願中

フタの取り付け方

⚠ 向きに注意!

フタのつまみと本体のラベルが
同じ方向にあることをご確認の上、
4隅を押し込んでください。

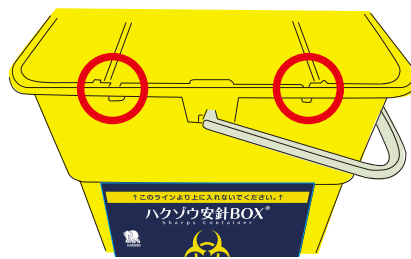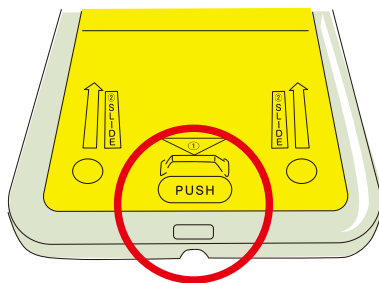

特長① ワンタッチクローズ式のフタ




フタの上部を軽く押すだけでフタが
閉まります。

特長② セーフティクローズ機能



開いている状態で転倒してもバネが働き、
自動で閉まります。

特長③ 簡便な最終封

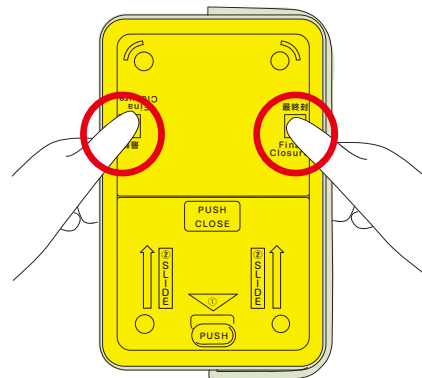


2カ所を押し込むだけで
最終封が完了します!

特長④ スライドオープン式のフタ



遠くからみても開放状態がよくわかる!
閉め忘れを防止!

特長⑤ スリット・ロック・ペンタイプの針に対応! 針付きシリンジを廃棄できる!

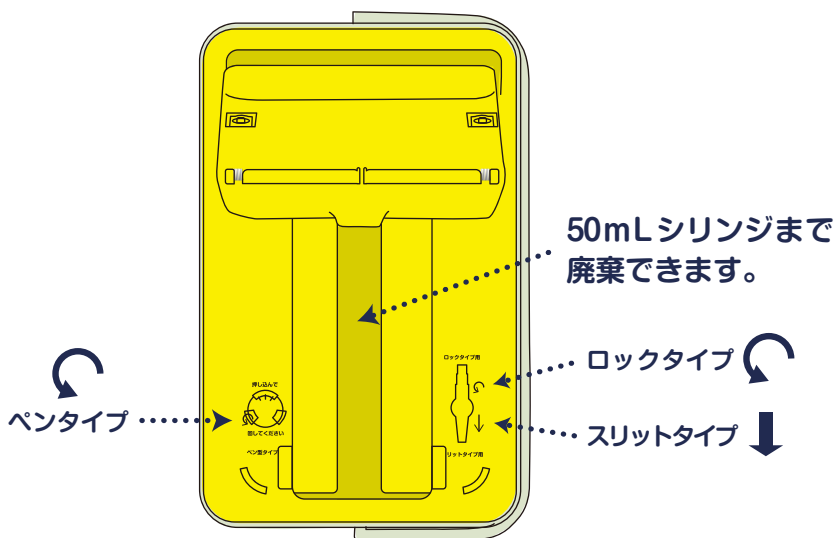

品番	品名	規格	包装	1個入数	JANコード
3118053	ハクゾウ安針BOX	3.5L HZ-001NYO 5個入	6袋	30個	4 958286 718330

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320