

(感染性注射針等廃棄容器)



ハクゾウ 安針BOX 3L

再使用禁止

針刺し切創事故防止対策のため、針を含む鋭利物を取り扱う医療従事者への『安心・安全』を考えて開発されました。

針刺し事故を防ぐために・・・

針刺し事故を防止するために、適切な廃棄容器を選択する必要があります。そのための専用廃棄容器の基準として・・・

- 耐貫通性で液漏れなどしないこと。
- 使用用途に応じた廃棄方法が可能であること。
- 容器が廃棄時に蓋が開かない構造であり、万が一倒れても中身が出ないようにされているもの。

などの条件が挙げられ、使用後から廃棄まで血液・体液暴露防止対策を行なっていかなければなりません。




回診車に取り付ける専用ホルダーをご用意しています。




※専用ホルダーに取り付けた写真

『ハクゾウ安針BOX』製品特長

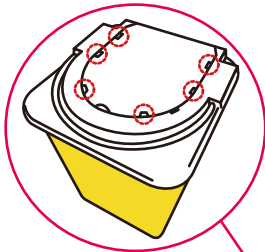

安全性が高い
6箇所に仮止め部分を設けており、しっかりと固定でき、開けやすい構造になっています。

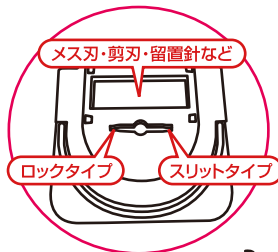

スリット・ロックタイプに対応可能
スリットタイプ、ロックタイプの注射針に対応可能であり、比較的広い空間で多数の注射針の廃棄が可能です。

入れ過ぎ防止ライン
『入れ過ぎ防止ライン』を設けており、廃棄の目安がわかります。



持ち運びやすい
容器のフタに取っ手を付けていますので、持ち運びに大変便利です。

記入スペース
容器には『病棟名』、『確認者』、『使用開始日』の記入スペースを設けています。



耐貫通性
容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。またポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。



「ハクゾウ安針BOX」使用方法

※血液等が付着していなくても鋭利な物は『感染性廃棄物』として廃棄します。


組み立て方

フタの取り付け方法




図のような状態にして、フタをカチッと音がるまで閉じます。組み立てた人は日付とサインを記入します。

各部の使用法

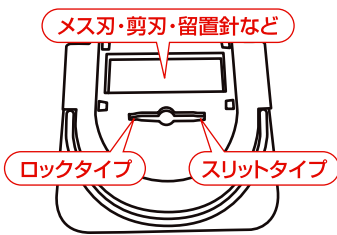


廃棄方法

①翼状針

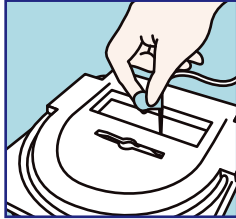


翼状の部分をしっかり持って四角の穴に落とします。

②メス刃・剪刃・留置針など

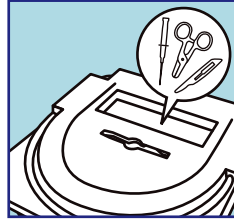


コップのように長いものは四角の穴に落とし廃棄します。注射針をシリンジごと捨てる場合についても四角の穴に捨てます。

③注射針(ロックタイプ)

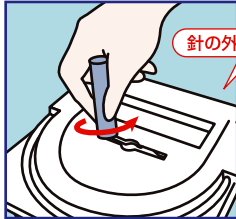

真ん中の穴に差し込み、「ロックタイプ側」に針基をセットして、シリンジを回転させながら外していきます。

④注射針(スリットタイプ)

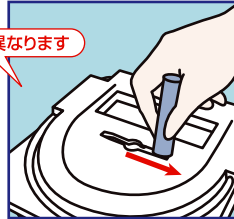


真ん中の穴に差し込み、「スリットタイプ側」に持っていき、そのままスライドさせて針を外します。

針の外し方が異なります


仮封・最終封

仮封

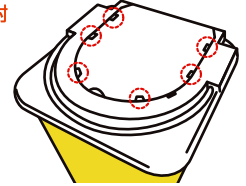

一時使用しない場合や容器を動かす場合には仮封をします。カチッと音がるまでとめます。仮止めは6箇所あります。

最終封

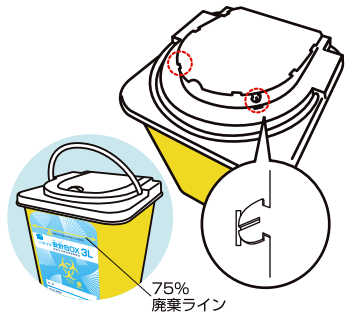

矢印のラインまで針を入れたら、最終封をします。この場合は、ツメを折り曲げて穴に差し込みしっかりと封をします。カチッと音がるまでツメを差し込みます(仮止めも6箇所とめる)。廃棄は本容器ごと廃棄します。

使用上の注意

- 強く振ったり、揺すったりしないでください。
- 詰めすぎに注意してください。(針が容器を突き抜けたり、飛び出す可能性があります)

運搬方法

- 移動の際は取っ手を持ち運搬してください。(針が突き抜けていた場合、誤刺する危険があります)



品番	品名	規格	包装	1箱入数	JANコード
3118051	ハクゾウ安針 BOX	3 L	5 個 / 袋	6 袋	4 958286 660011

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844