



Design Your Voice

Hakuzo

ハクゾウ

創傷保護用吸収パッド

未滅菌

ラップキュアドレッシング

一般医療機器

HAKUZO WRAP CURE DRESSING

固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートを

ロール状にした創傷保護用吸収パッドです。




製品特長

1 固着しにくいフィルム使用

パッドの表面には、患部とくっつきにくいポリエチレンフィルムを使用しています。


構造

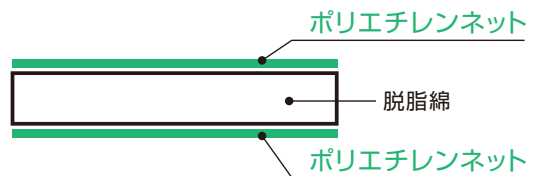

2 湿潤環境

穴あきのポリエチレンネットにすることにより、浸出液を脱脂綿が吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。

イメージ図

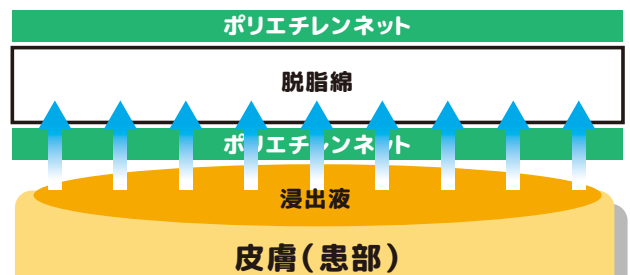

3 自由な長さにカット

ロールタイプのため、患部にあったサイズにカットでき、無駄がなく便利。



箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで測ることができます。)



No.75

1巻入

幅75mm×全長5m



No.150

1巻入

幅150mm×全長5m

製品コンセプト

ハクゾウラップキュアドレッシングは、適度な湿潤環境を保持し、手軽で簡単に使えることコンセプトにし、現在の創傷被覆材に求められている下記の特長を取り揃えた創傷ケア製品です。

単純化

- ・医療材料の統一化
- ・簡単な医療材料


サイズ

- ・患部にあったサイズ of 材料
- ・自分で希望のサイズをカットできる


吸収性

- ・湿潤状態を保つ。
- ・過度の浸出液は吸収し正常な皮膚は湿潤状態にしない。

使用方法

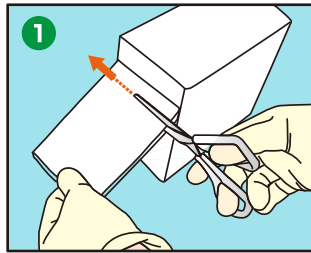

取り出し口のミシン目を破りロールを引き出し、ハサミ等で必要な長さにカットしてください。

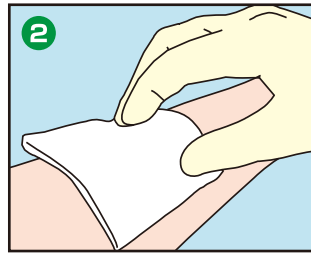

創傷面にパッドを当て、テープ等で固定してください。

適用範囲

◎比較的浸出液の少ない創傷。

※浸出液の多い創傷、感染創には適用できません。

対象施設

◎医療・介護施設

◎在宅 など

2022年8月作成(第1版)

届出番号 43B2X00007D00006

医 04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDN コード 11751000

ハクゾウラップキュアドレッシング


再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：脱脂綿の両面にポリエチレンネット

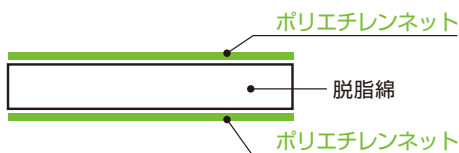

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、ロール状のものから必要な寸法を切り取ったパッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1.パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼りかえること。
- 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3.本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。

4.本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
 - ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。





- 2.有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
阿蘇製薬株式会社
〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1
TEL 03-5422-3365

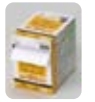・販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
<https://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

品番	規格	サイズ	包装	1箱入数	JANコード
3155150	 No.75	幅75mm × 全長5m	1巻入	20箱	 4 958286 720203
3155151	 No.150	幅150mm × 全長5m	1巻入	20箱	 4 958286 720210

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320