

販売名:ハクゾウ滅菌カニューゼ  
 [一般医療機器]医療ガーゼタイプII  
 届出番号27B2X0024300011

# ハクゾウ滅菌カニューゼN 滅菌済


## 滅菌済 Y カットガーゼ

カニューレなどを挟み込めるようにY型に切り込みを入れた滅菌済の処置用ガーゼです。



### 製品特長

- 目の細かいタイプIIガーゼを使用しています。
- コンパクトサイズになっています。
- 規格ごとにパッケージが色分けされています。
- 滅菌バッグ、中箱にインジケータラベルを付けています。
- 取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

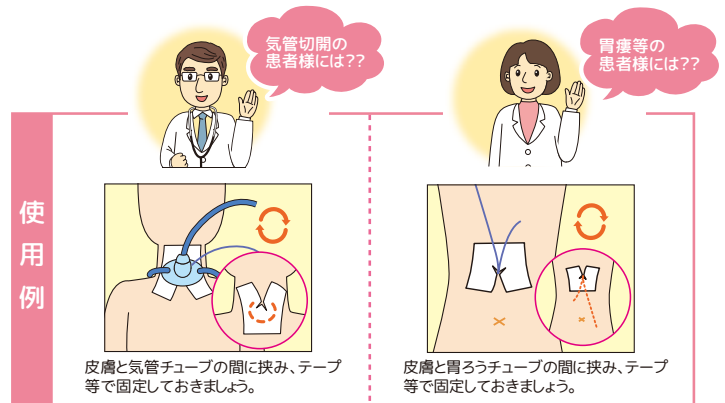

\*\* 2016年 4月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)  
\* 2009年 10月改訂(第2版)

届出番号:27B2X0024300011

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ JMDNコード 13700000

## ハクゾウ滅菌カニューゼ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\* 綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品を酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。  
本品はY字等の切り込みが入っている。

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

### 【使用方法等】

\* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\* 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\* 2. 有効期間

・本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
\* 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*\* <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451 (代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロードいただくか、弊社営業までご連絡ください。  
<http://www.pmda.go.jp/>  
<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	種類	規格	包装	サイズ/製品重量	1梱入数	サイズ/製品重量	JANコード
1153689	1枚入	7.5cm×7.5cm 12ply	1枚×50袋/箱	W165×D100×H127mm	20箱	W510×D340×H270mm	 4 958286 710020
1153690	2枚入	7.5cm×7.5cm 12ply	2枚×30袋/箱	W165×D100×H127mm	20箱	W510×D340×H270mm	 4 958286 710037

※詳細は、各営業担当にお申し出ください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320