- ・血液、浸出液の吸収に好適なスリムタイプの当てパッド
- ・ムレにくい透湿性防水フィルム付き



一般医療機器

バクツラ減菌キュアドレS

滅菌済

血液・浸出液の吸収に好適な、透湿性防水フィルム付きの薄型当てパッドです。



使用用途


血液や浸出液の吸収 創傷部位の保護

製品特長① かさばらない薄型タイプのパッド

7 層構造のかさばらない薄型タイプのパッドです。



製品特長③ バックシートが肌色で目立ちにくい

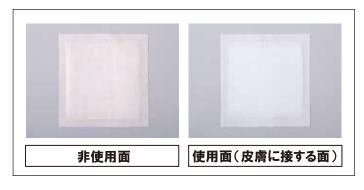

製品特長② 高吸収ポリマーを使用


高吸収ポリマーシートを使用してますので、 血液や浸出液を しっかりと吸収します。



※測定方法『一般医療機器医療脱脂綿基準』吸収量の試験項目に準じて水で計測。

製品特長④ 透湿性防水フィルムを使用

防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用 していますので、ムレを軽減できます。

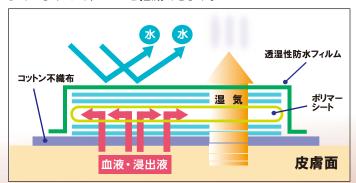

医04 整形用品

一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000

ハクゾウキュアドレS

再使用禁止

【禁忌・禁止】 ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

表面材:脱脂綿

吸収材:レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの

複合材・紙・高吸水性樹脂 防水材: ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤(ホットメルト)でシート状に一体化したもの。

【使用目的又は効果】

術後創傷の被覆・保護又は浸出液の吸収を目的としたパッド。

【使用方法等】

- 1.創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、無菌的に滅菌袋より取り出し、本品の吸収面(白色面)を創部に当てること。
- 2.医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定すること。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
- (1)裁断加工禁止
- (2)体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。
- (3)本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (4)本品使用中は創の観察を十分に行い、浸出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- (5)創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行うこと。

2.不具合・有害事象

- 本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。
- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- •疼痛

3.その他の注意

防水材側を創部側に使用しないこと。(吸収しないため) 一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に 保管すること。

2.有効期間

本品の容器若しくは被包に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

• 製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

http://www.hakuzo.co.jp/

TEL 06-6942-0451代

添付文書をお求めの場合は下記サイトから

ダウンロードいただくか、弊社営業までご連絡ください。

http://www.info.pmda.go.jp/ http://www.hakuzo.co.jp/

規格	15cm×15cm	15cm×30cm	26cm×30cm	
吸収体 イメージ図	15	30	26	
製品重量 (滅菌バッグ除く)	約 6g/ 枚	約 12g/ 枚	約 20g/ 枚	

品 番	規 格	包 装	サイズ / 重量	1 梱入数	サイズ / 重量	JAN コード
3036100 1	15cm×15cm	1枚/袋×30袋	W260×D140×H140mm	4箱	W535×D295×H155mm	4 958286 709918
			約 400g		約 2168g	
3036101	15cm×30cm	1枚/袋×30袋	W260×D215×H140mm	4箱	W535×D445×H155mm	
			約 676g		約 3422g	4 958286 709925
3036102	26cm×30cm	1枚/袋×15袋	W220×D215×H140mm	4箱	W455×D445×H155mm	
			約 494g		約 2700g	4 958286 709932

※詳細は各営業担当にお申し付けください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

TEL. 06-6942-0451 http://www.hakuzo.co.jp/

京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320