

医04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDNコード 11751000


# 傷あてパッド

再使用禁止

※（滅菌済医療機器）

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

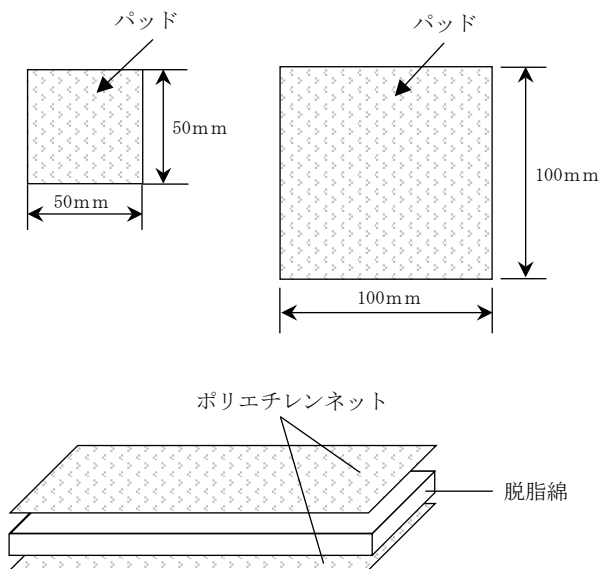

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法
  - ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
  - ※・小児の手の届かないところに保管すること。
2. 有効期間
  - 本品の容器若しくは被包に記載
  - [自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

※ TEL 03-5422-3365

\*本品は、脱脂綿の両面にポリエチレンネットを貼り付けたものである。

**【使用目的又は効果】**

創傷面の保護

**【使用方法等】**

傷口を清潔にして、パッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

**【使用上の注意】**

- ・重要な基本的注意
1. パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに取り替えること。
  2. 本品の使用は1回限り、再使用はしないこと。
  3. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
  4. 包装開封後、速やかに使用すること。