

単回使用



一般医療機器

届出番号27B2X00243000156



Design Your Voice

Hakuzo

アルギン酸カルシウム不織布
止血用パッド

ハクゾウALGパッド

- ・透析終了後の穿刺部位の圧迫止血に
- ・止血困難な患者様に

EOG
滅菌済

1個滅菌を
規格追加
しました。



【サイズ】


●2cm×2cm

【素材】

- 防水シート(表面):ポリエチレン
- 不織布:アルギン酸カルシウム
- メッシュシート(圧迫面):ポリエチレン



断面図

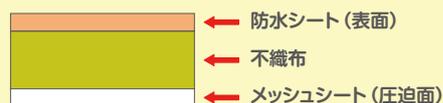

アルギン酸カルシウムとは？

コンブやワカメなどから抽出したアルギン酸をカルシウム塩にして繊維状に加工したもの。アルギン酸カルシウム不織布は血液を吸収してゲル化します。


【製品特長】

- ①アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
- ②穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
- ③個包装のため、使用ごとに開封して衛生的にご使用いただけます。シーンに合わせて、1個入と2個入から選択していただけます。




ハクゾウメディカル株式会社

使用方法

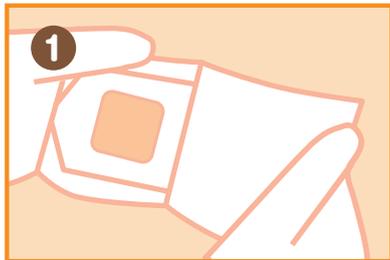

①滅菌バッグを開封して製品を取り出してください。

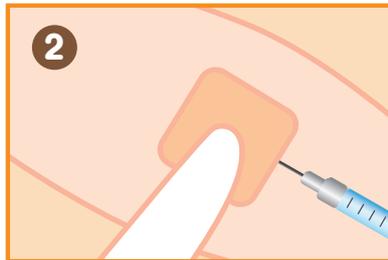

②製品のメッシュシート側(白色)を直接穿刺部位に押し当て、針やカテーテル等を抜去してください。



③止血が完了するまで、施設ごとの手順に従い、圧迫止血を継続してください。使用中は止血の状態確認を適時行ってください。

2022年4月作成(第1版)

医04 理学診療用器具

届出番号27B2X00243000156

一般医療機器 止血用押圧器具 JMDNコード 70617000

ハクゾウALGパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエチレンからなるメッシュシート、アルギン酸カルシウムからなる不織布、ポリエチレンからなる防漏シートの3種類の基材を貼り合わせた3層構造のパッドで、酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具である。

【使用方法等】

製品を無菌的に取り出し、止血部分にメッシュシート(白色)側をあて、圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1)包装開封後、速やかに使用すること。
- 2)本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

品番	規格	包装	箱サイズ(mm)	1 梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード	GS1コード
			箱重量(g)		ケース重量(kg)		
1290201	2 cm × 2 cm 1 個滅菌	100 袋入	W265×D89×H65	20 箱/ケース	W455×D272×H317	4 958286 081151	(01)14958286081158
			141		3.3		
1290200	2 cm × 2 cm 2 個滅菌	100 袋入	W265×D89×H65	20 箱/ケース	W455×D272×H317	4 958286 080680	(01)14958286080687
			150		3.5		

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320



「添ナビ」アプリを使ってGS1コードから添付文書をご確認できます。