

メンカク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%からなる繊維をパッド状にし、裁断したものである。

種類	包装
4 cm×4 cm	100 g /袋
4 cm×4 cm	500 g /箱
5 cm×6 cm	500 g /箱
8 cm×8 cm	500 g /箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

- ** 1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

** 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

** <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)