

医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

## エレバン

再使用禁止

(滅菌済医療機器)

### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者への使用は禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリ塩化ビニル製フィルム、ゴム系粘着剤

パッド：不織布、ポリエチレンネット

セパレータ：ポリエチレンフィルム

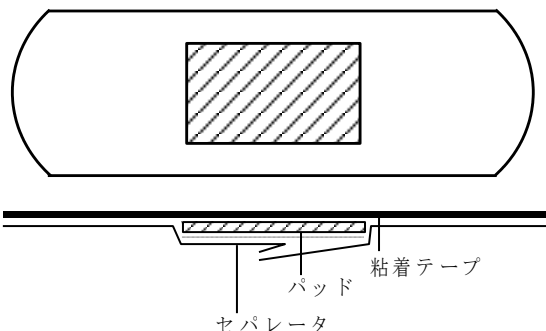

種類	サイズ	1箱入数
No. 100M	19mm×72mm	100 枚
No. 200M	19mm×72mm	200 枚
No. 300L	25mm×72mm	100 枚

### 【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷面の被覆及び保護

### 【使用方法等】

傷口とその周辺を清潔にし、パッドに触れないようにして、セパレータをはぎ取り、パッドを傷口に当て粘着部分で皮膚に固定する。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
  1. 本品の使用は一回限り、再使用しないこと。
- \*\* 2. 滅菌済ですので、個包装を破損しないようご注意ください。
- \*\* 3. 包装開封後、速やかに使用すること。
- \*\* 4. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。

5. 1日に2～3回貼り替えること。

6. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼りかえること。

\*\*7. 粘着面を患部に貼らないこと。

8. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。

\*\*9. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

TEL 096-232-3933

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

\*\* <http://www.hakuzo.co.jp/>

\*\* TEL 06-6942-0451(代)