

# ELEBAN WIDE DX

## エレバンワイドDX

### サージカルドレッシング

一般医療機器 救急絆創膏



Design Your Voice

# Hakuzo

届出番号 43B2X00005000076

EOG滅菌済



## 特長

### ■吸収パッド部

吸水性の良いコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部に優しいドレッシングです。


### ■低刺激性

粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。

### ■撥水加工

粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。

## パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング

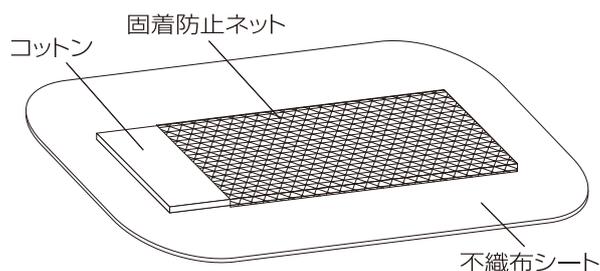

# ELEBAN WIDE DX

## エレバンワイドDX

### サージカルドレッシング

一般医療機器 救急絆創膏

滅菌済

パッドに創部への固着防止ネットを採用した  
サージカルドレッシング

\* 2016年4月改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)  
2009年8月作成(第1版)

届出番号 43B2X00005000076

医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

再使用禁止

## エレバンワイドDX

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

パッド：脱脂綿、ポリエチレン

粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

### 滅菌済医療機器

- ・ No. 50 (50mm×80mm) 50枚入
- ・ No. 60 (60mm×100mm) 50枚入
- ・ No. 80 (80mm×130mm) 30枚入
- ・ No. 100 (100mm×160mm) 30枚入

### 【使用目的又は効果】

創傷面の保護

### 【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置をかえること。
- 3) パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。

- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

- \* 2. 有効期間  
【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者  
リハテープ製薬株式会社  
熊本県熊本市北区植木町岩野45  
TEL 0120-199-189

・販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

- \* <https://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451 (代)

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155001	No.50	5cm×8cm(パッド2cm×4cm)	50枚/箱	20箱	 4 958286 701219
3155002	No.60	6cm×10cm(パッド3cm×6cm)	50枚/箱	20箱	 4 958286 701226
3155003	No.80	8cm×13cm(パッド4cm×9cm)	30枚/箱	20箱	 4 958286 701233
3155004	No.100	10cm×16cm(パッド5cm×10cm)	30枚/箱	20箱	 4 958286 701240

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320