

透明フィルムドレッシング

エレバンフィルムS



一般医療機器

ELEBAN FILM

ポリウレタンの透明フィルムを使用した
防水性創傷被覆保護用ドレッシング



製品特長

ポリウレタンフィルム

しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。


透湿性・バリア性

水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。

低アレルギー性


天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています。(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)

使用方法

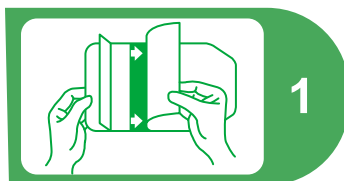

1

裏面の剥離紙の大きい方をゆっくり剥がしてください。

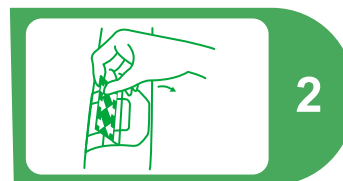

2

処置部等に貼りながら、残りの剥離紙をゆっくりと剥ぎとり、フィルムの縁を念入りに押さえて確実に貼り付けてください。剥離用フィルムの中央の矢印(どちらからでも剥がせます)からゆっくり剥がしてください。



3

残りの固定用フィルムを残った矢印の方向へゆっくりと剥がしてください。

使用用途

- 創傷面の被覆保護
- 注射針、カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護

2009年8月20日作成(第1版)

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

届出番号 43B2X00005000078

エレバンフィルムS

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリウレタン、アクリル系粘着剤

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護

【品目仕様等】

滅菌済医療機器

【操作方法又は使用方法等】

貼付部位及び処置方法に合ったサイズのドレッシングを選択してください。

- 1) 裏面の剥離紙の大きい方をゆっくり剥がしてください。
- 2) 処置部等に貼りながら残りの剥離紙をゆっくりと剥ぎ取ってください。
フィルムの縁を念入りに押さえ確実に貼り付けてください。
- 3) 剥離用フィルムの中央の矢印(どちらからでも剥がせる)からゆっくり剥がしてください。
- 4) 残りの固定用フィルムを残った矢印の方向へゆっくりと剥がしてください。
使用后、本品を剥がす場合は、まわりの皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくりと剥がしてください。剥がれにくい場合、及び粘着剤の残渣がみられる場合は医療用剥離剤を使用してください。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 処置部から渗出液や出血が見られる場合には使用しないこと。
- 2) 明らかに感染症を有している部位には使用しないこと。
- 3) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 4) 皮膚の弱い方には、同じところに繰り返し貼らないこと。
- 5) 貼付部位は、感染症・皮膚障害の兆候を確認するため、毎日観察すること。

- 6) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。
- 7) 処置部を清潔にし、水気をよく取ってから貼付すること。特に消毒剤等を使用の際には乾燥してから貼付すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間・使用の期限

未開封の状態では5年間[自己認証(自社データ)による]

【包装】

- ・No.50(50mm×70mm)100枚入
- ・No.60(60mm×90mm)50枚入
- ・No.80(80mm×120mm)50枚入
- ・No.100(100mm×150mm)50枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売者：リバテープ製薬株式会社

住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45

電 話：0120-199-189

製 造 者：リバテープ製薬株式会社

住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45




【販売業者の氏名又は名称及び住所】

販 売 者：ハクゾウメディカル株式会社

住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

電 話：06-6942-0451(代)

添付文書が必要な場合はお申し出ください

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155031	No.50	5cm×7cm	100枚/箱	20箱	 4 958286 701462
3155033	No.60	6cm×9cm	50枚/箱	20箱	 4 958286 701479
3155035	No.80	8cm×12cm	50枚/箱	20箱	 4 958286 701486
3155037	No.100	10cm×15cm	50枚/箱	20箱	 4 958286 701493

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844