

Pressure hemostatic bandage


圧迫止血用絆創膏

エレバンプレスタット®EX


ELEBAN PRESTAT®EX

注射・採血・点滴・関節穿刺時に使用する圧迫止血絆創膏です。


分厚く、伸縮性の高いテープで
保護部をモレなくカバー

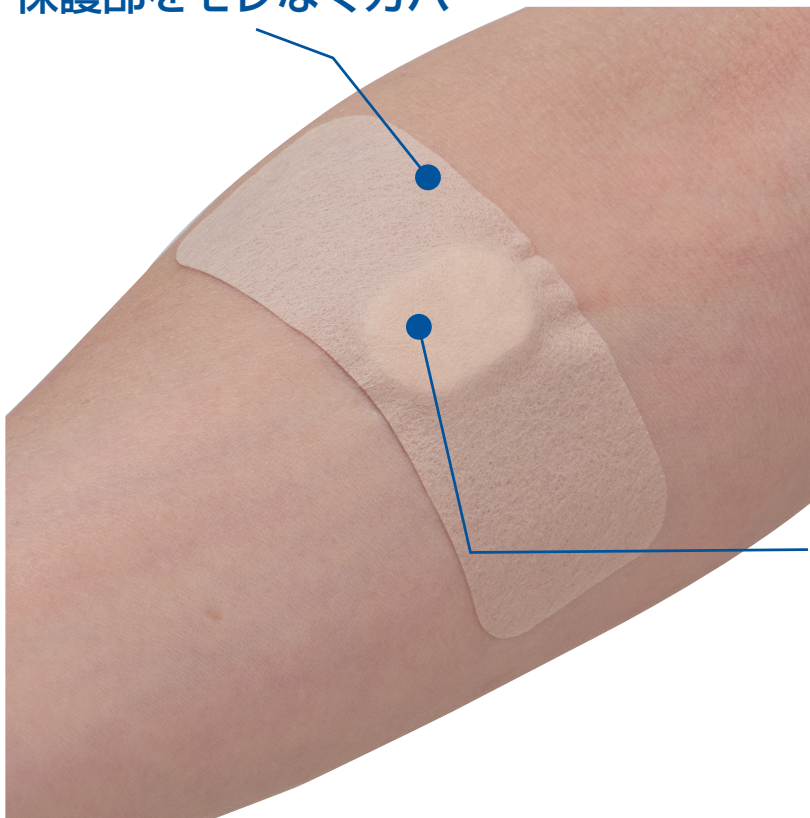

皮膚穿刺部と血管穿刺部の
両方を圧迫止血できる大きめパッド

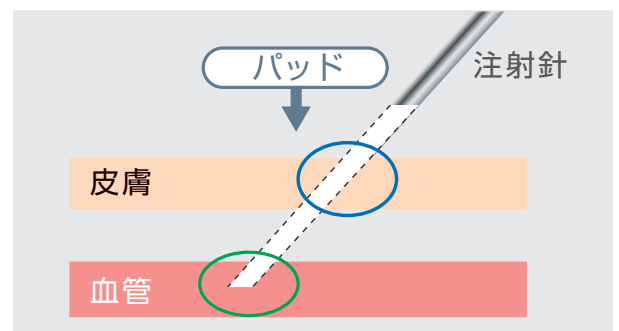

青丸：皮膚穿刺部
緑丸：血管穿刺部

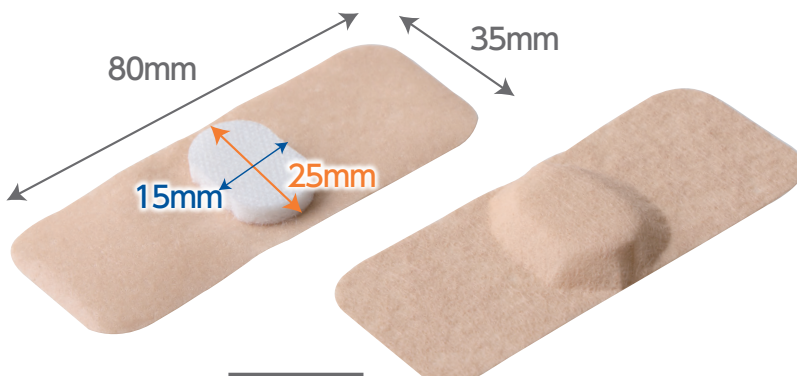

使用手順動画は
こちらから⇒




※動画は「エレバンプレスタット®」を
使用した手順動画になります。

パッドの構成


Point 不織布の上にポリネットがあるので、
傷口に固着しにくくなっています。

	ポリネット
	セルロース不織布
	ホットメルト不織布
	ニードルパンチ不織布


使用方法

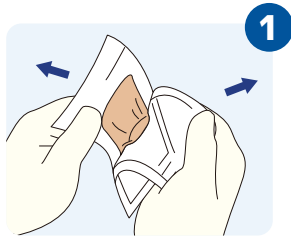


滅菌袋を開き、プレスタットを取り出します。

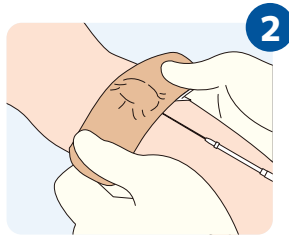


片方の剥離紙(長い方)を剥がし穿刺針を刺したままパッド部分の中心が穿刺部に来るように軽く貼ります。

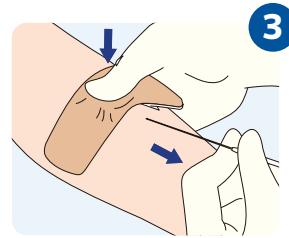


パッドを親指で軽く圧迫しながら穿刺針を抜きます。

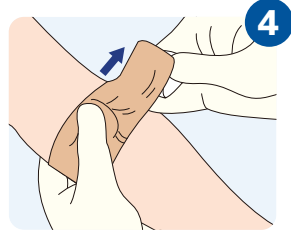

圧迫しながら左側の粘着テープ部分をしっかり押さえて確実に貼り付けてから、もう一方の剥離紙を剥がします。

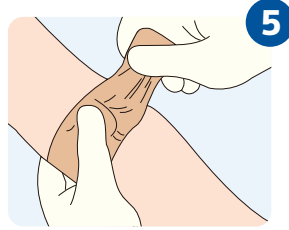

粘着テープ部分を同じように貼り付けます。

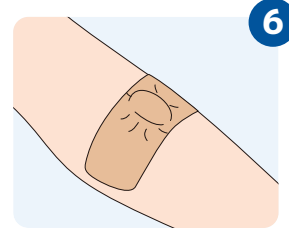

しっかり圧迫固定されているか確認します。

2024年9月作成(第1版)

医04 整形用品

届出番号 27B2X00243000170

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000 (一般医療機器 止血用押圧器具 JMDNコード 70617000)

再使用禁止

エレバン プレスタット[®] EX

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】 本品は滅菌済みである。

粘着テープ：ウレタン不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコン樹脂

パッド：ポリエチレン/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、

セルローススポンジ、ポリアミド、ポリエステル

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等、及びカテーテル挿入部位や注射針等の穿刺部を圧迫止血するために用いる。

【使用方法等】

- 1.包装を開いて本品を取り出す。
- 2.針又はカテーテルを抜く直前に、パッド長径が血管の走行に一致する向きで血管刺入点にパッドを当て、軽く仮止めする。
- 3.パッドに軽く指をそえながら、針又はカテーテルを抜く。抜去と同時に、そえていた指でパッドを強めに圧迫する。
- 4.パッドを圧迫しながら、片方ずつ粘着テープ部を1cm程度引き伸ばし、はがれないように皮膚に貼付する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1.傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- 2.本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。
- 3.本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4.粘着面を患部に貼らないこと。
- 5.本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
- 6.救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

7.包装開封後、速やかに使用すること。

8.テープを必要以上に伸ばして貼ると、皮膚刺激の原因となるので注意すること。

9.血管や皮膚の損傷をさけるため、必ず針又はカテーテルを抜いてから貼付すること。

10.本品は貼付してから2時間を目安にはがすこと。

11.はがしたときは、止血していることを必ず確認すること。止血が不十分だった場合は、用手圧迫止血等の適切な処置を行うこと。

12.はがしたあとは、穿刺部を救急絆創膏等で保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間：本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者 ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL 06-6942-0451(代)

品 番	規 格	包 装	1 梱 入 数	JANコード
3155070	粘 着 部：35mm×80mm パッド部：15mm×25mm	50枚／箱	20箱	 4 958286 082158



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマー課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
名古屋支店 ☎052-769-6021
三重営業所 ☎059-350-3844
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118