



Design Your Voice
Hakuzo

EOG滅菌済

穿刺部被覆保護用

エレバン プレスタット

■ ELEBAN PRESTAT ■

一般医療機器

止血効果に優れた
穿刺部被覆保護用絆創膏



エレバンプレスタット
使用手順動画

＼QRコード／



特長

- **粘着テープ**
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
- **包装**
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
- **吸収パッド**
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。

肌につけて
目立たない
ベージュ色

伸縮性に優れたウレタン不織布
低アレルギー性のアクリル系粘
着材を使用



コットン100%で程よい硬さに
圧縮したパッド

パッドの吸収性


通常時




湿潤時




使用方法

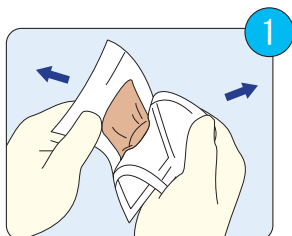


滅菌袋を開き、プレスタットを取り出します。

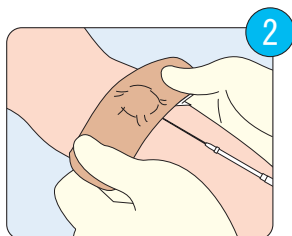


片方の剥離紙(長い方)を剥がし穿刺針を刺したままパッド部分の中心が穿刺部に来るように軽く貼ります。

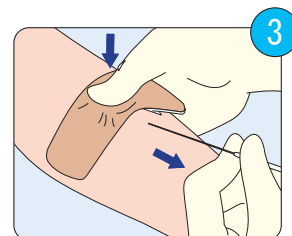


パッドを親指で軽く圧迫しながら穿刺針を抜きます。

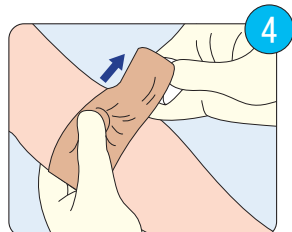

圧迫しながら左側の粘着テープ部分をしっかりと押さえて確実に貼り付けてから、もう一方の剥離紙を剥がします。

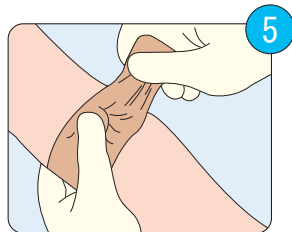

粘着テープ部分を同じように貼り付けます。

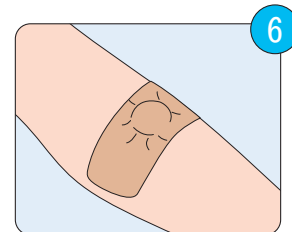

しっかり圧迫固定されているか確認します。

** 2016年 4月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂) 医04 整形用品
* 2009年10月改訂(第2版)

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

届出番号 27B2X00243000102

再使用禁止

エバン プレスタット

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド : 脱脂綿
粘着テープ : ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

* 身体の部位に用いる、接着剤を付した布製又はプラスチック製の各種形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- * 1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- * 2. 包装開封後、速やかに使用すること。
- * 3. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- * 4. 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- * 5. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼りかえること。

- 6. 粘着面を患部に貼らないこと。
- 7. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 8. テープを過度に伸ばした状態で皮膚に貼付すると皮膚への刺激が高まる恐れがあるため注意すること。
- 9. 本品は貼付してから2時間を目安に剥がすこと。また、剥がす際は止血が完了していることを確認すること。
- 10. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

** 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
* 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
** <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155061	35mm×80mm(パッドφ20mm)	50枚/箱	20箱	4 958286 711102



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三重営業所 ☎059-350-3844 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
京都営業所 ☎075-603-4826 北陸駐在所 ☎076-225-8013
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
阪神営業所 ☎078-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320