



Design Your Voice  
**Hakuzo**

穿刺部被覆保護材

# ELEBAN SHOT

エレバン ショット

EOG滅菌済

[一般医療機器] 救急絆創膏

届出番号43B2X00005000074

注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材



## 特長

### 作業性


固定用シートを台に貼り付け、片手で容易に処置が可能です。

### 簡便性

テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼り付けが容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。

### 包装


作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。

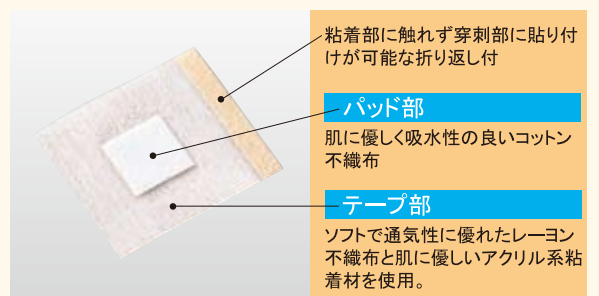


# ELEBAN SHOT

## エレバンショット


### 使用方法

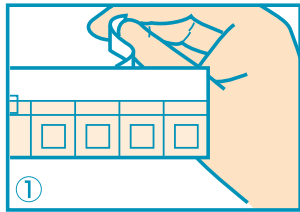


① シート裏面の固定用テープの剥離紙を剥がします。

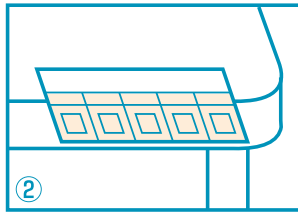

② 治療台の端に固定します。

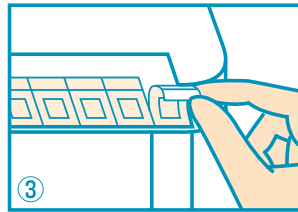

③ 折り返しされている部分を下に向けて台紙から剥がしてください。

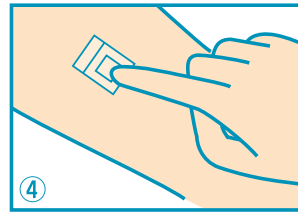

④ そのまま粘着部に指が触れないようにして注射後の穿刺部に貼ってください。

\*2016年 4月改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)  
2009年 8月作成(第1版)

医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

届出番号 43B2X00005000074

## エレバンショット

### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

パッド : 不織布  
粘着テープ : レーヨン・合成繊維、アクリル系粘着剤  
滅菌済医療機器  
・S サイズ(20×23mm) 1000 枚入  
・M サイズ(27×30mm) 500 枚入

### 【使用目的又は効果】

創傷面の保護

### 【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分をささないよう注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置をかえること。
- 3) パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくとう傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。

- 5) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

### 【保管方法及び有効期間等】



- 1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

### \* 2. 有効期間

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
リバテープ製薬株式会社  
熊本県熊本市北区植木町岩野45  
TEL 0120-199-189
- ・販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪府中央区徳井町2丁目4番9  
\* <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155011	Sサイズ	20mm×23mm(パッド8mm×8mm)	25枚/袋×40袋/箱	20箱	 4 958286 703015
3155013	Mサイズ	27mm×30mm(パッド15mm×15mm)	20枚/袋×25袋/箱	20箱	 4 958286 703022

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪府中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320