

ELEBAN STANCH

エレバンスタンチ


届出番号43B2X00005000075



穿刺部被覆保護材

EOG滅菌済

[一般医療機器] 救急絆創膏

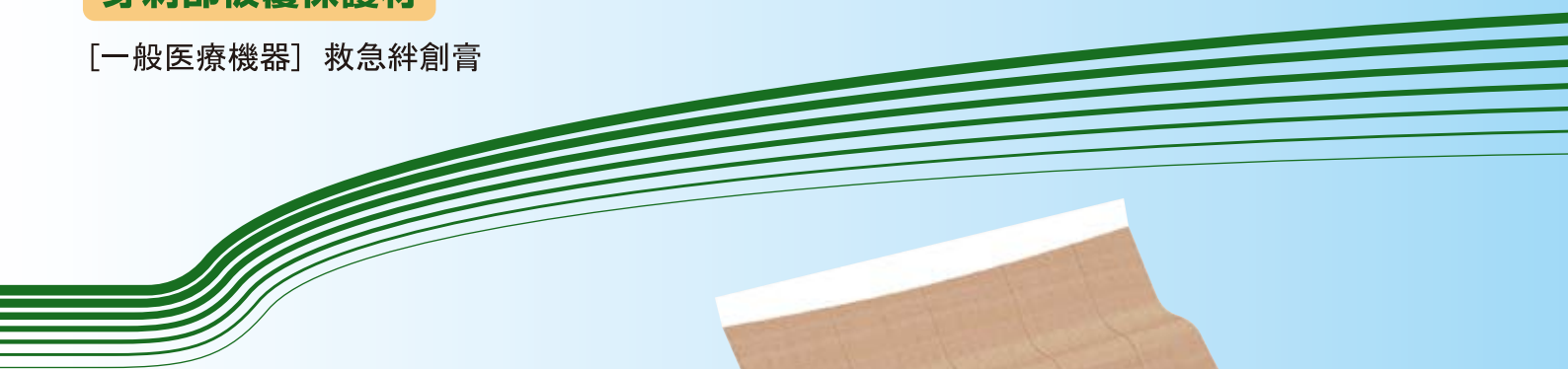

注射・採血後の穿刺部被覆保護材
スピーディーにワンタッチで
確実に止血処置




ELEBAN STANCH

エレバンスタンチ


穿刺部被覆保護材

処置が容易で穿刺部を効果的に圧迫し、優れた止血効果が得られる被覆保護材です。

使用方法

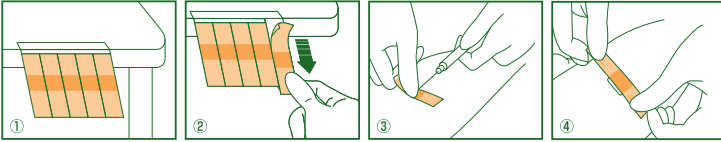

- ①シート裏面の固定用テープの剥離紙を剥がし、治療台の端にしっかり固定します。
- ②パッド部分を親指と人差し指でしっかりつまみ、水平に引っ張り、裏面のミシン目から切り取ってください。
- ③注射針を刺したままパッド部分を穿刺部に当て親指でかたく圧迫しながら注射針を抜いてください。
- ④残りの剥離紙を剥がし、しっかり圧迫固定してください。

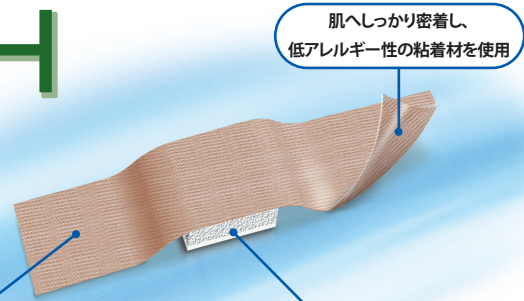

肌へしっかり密着し、
低アレルギー性の粘着材を使用

強度に優れ、肌に貼り付けて
目立たない布テープ

圧迫力と吸収性を両立した
2層パッド

特長

●作業性

5連仕様の製品を固定用テープに貼り付け、スピーディーに片手で容易に剥がして使用することができます。

●圧迫性

程よい伸縮性と強度に優れた布製テープと2層構造のパッドで、優れた圧迫力が得られます。

●包装

1袋5シート入りで、EOG滅菌済です。

2009年8月20日作成(第1版)

医 04 整形用品

届出番号 43B2X00005000075

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

エレバンスタンチ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：不織布

粘着テープ：ポリエステル・綿、合成ゴム

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【品目仕様等】

滅菌済医療機器

【操作方法又は使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- 3) パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間・使用の期限

未開封の状態です5年間[自己認証(自社データ)による]

【包装】

500枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売者：リバテープ製薬株式会社

住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45

電 話：0120-199-189

製 造 者：リバテープ製薬株式会社

住 所：熊本県鹿本郡植木町岩野45

【販売業者の氏名又は名称及び住所】

販 売 者：ハクゾウメディカル株式会社

住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

電 話：06-6942-0451(代)

添付文書が必要な場合はお申し出ください

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155053	5シート	20mm×70mm(パッド20mm×15mm)	25枚/袋×20袋/箱	10箱	4 958286 703121

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844