

産後向けクッション

(U字型クッション) ママらくfit U[®]

共同研究
共同開発

国立国際医療研究センター
国立看護大学校

体圧分散、通気性に優れた
産後向けのU字型クッション



第59回日本母性衛生学会総会・学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
-試用後の質問紙自由記載内容の分析による効果の検討-
-使用素材の検討と選択-
国立看護大学校 渡邊 香先生、戸津 有美子先生

第33回日本助産学会学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
-試用物の物理的観察と改良-
国立看護大学校 渡邊 香先生、戸津 有美子先生

第7回看護理工学会学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
-開発物の体圧分散試験結果の検討-
-開発物の洗浄・消毒試験結果の検討-
国立看護大学校 渡邊 香先生、戸津 有美子先生

第60回日本母性衛生学会総会・学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
-改良版試用後の質問紙分析による効果の検討-
国立看護大学校 渡邊 香先生、戸津 有美子先生

第35回日本環境感染学会総会・学術集会 発表
産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発
-三次元網目構造U字クッションの再使用処理方法の検討-
国立看護大学校 網中 真由美先生、西岡 みどり先生、
戸津 有美子先生、渡邊 香先生

ママは、出産後に外陰部の創傷や脱肛を伴い
痛みを抱えながら日常生活を行っています。
そんなママのために、体圧を分散し通気性が高い、
U字型クッションを共同開発しました。

カラーバリエーション



パールブルー



ネイビー

体圧分散、
通気性に優れた
2種類の素材を
採用！！

V-Lap[®]不織布

カルファイバー

製品特長

体圧分散、通気性などに優れた素材(カルファイバー、V-Lap®不織布)を2種類使用しています。

カルファイバー

高弾性と体圧分散性を両立した新素材クッション材

素材：ポリプロピレン100%
 特徴：高弾性・高反発、通気性、保時性、軽量、耐熱性、清潔維持の簡便性 (0.5w/v%(5,000ppm)次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノール、イソプロパノール70%等の薬液に浸して消毒することができます。)



優れた透水性と速乾性で簡単に洗えます。また、消毒液・除菌剤などを直接噴霧し、簡単にお手入れもできます。


95%以上の空隙構造のため、通気性が高く、ムレにくい素材。

80,000回の圧縮試験をクリアした高い耐久性。

【他の素材との体圧分散効果の比較】

<55kgの女性における比較> 圧力 (kPa)

	最小圧力	最大圧力	平均圧力	標準偏差
本製品	0.00	16.57	4.26	±4.52
ウレタン製円座	0.00	20.88	4.45	±5.38
ゴム製円座	0.00	25.38	4.59	±5.94

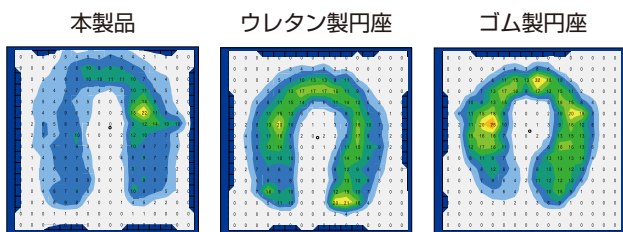

V-Lap®不織布

軽量・快適繊維クッション材

素材：ポリエステル繊維
 特徴：通気性、軽量、耐熱性、清潔維持の簡便性。




タテ方向の繊維で、クッション材として非常に優れています。

V-Lap®不織布 取扱い方法

●生地特性上、洗濯により多少の縮みが生じることがあります。●40℃までの洗濯機洗いが可能です。●洗濯ネットをご使用ください。●軽く脱水した後、陰干ししてください。●アイロンは低温にてあて布を使用してください。●乾燥機を使用する場合は上限温度80℃以下に設定してください。●洗剤は中性洗剤をおすすめします。●五類感染症への消毒が可能。微温湯で洗浄後すすぎの段階で、0.01~0.02w/v%(100~200ppm)次亜塩素酸ナトリウム5分間浸漬消毒してください。

カバーも通気性・クッション性に優れた素材を採用しています。 素材：ポリエステル100%

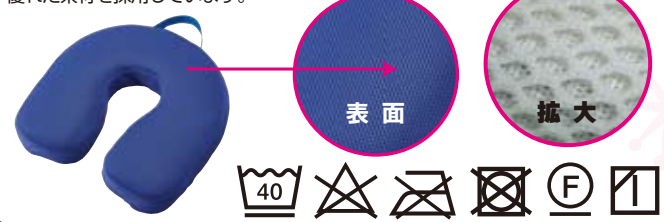

使用上の注意点

- ご使用いただく際は、ジッパーを下側に向けてお座りください。
- 折り曲げてのご使用はしないでください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- 乳幼児や小児の手の届く所に保管しないでください。

製品情報

品番	品名	規格	包装	サイズ/製品重量	1箱入数	サイズ/製品重量	JANコード
2590130	ママらくfitU	ネイビー 1個入	1箱	W453xD460xH76mm	15箱/ケース	W1,200xD500xH500mm	4 958286 714813
				1,040g		17,7kg	
2590132		パールブルー 1個入	1箱	W453xD460xH76mm	15箱/ケース	W1,200xD500xH500mm	4 958286 714837
				1,040g		17,7kg	

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318 三重営業所 TEL:059-350-3844 札幌駐在所 TEL:011-788-8009
 東京支店 TEL:03-3522-6720 京都営業所 TEL:075-603-4826 北陸駐在所 TEL:076-225-8013
 北大阪支店 TEL:072-653-4045 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118 高松駐在所 TEL:087-813-7416
 南大阪支店 TEL:0721-20-2900 阪神営業所 TEL:078-262-1634 松山駐在所 TEL:089-994-8649
 仙台営業所 TEL:022-393-7434 神戸営業所 TEL:078-940-8975 鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
 関東営業所 TEL:03-5809-4780 広島営業所 TEL:082-849-4188 沖縄駐在所 TEL:098-941-5320
 西東京営業所 TEL:042-646-0451 福岡営業所 TEL:092-481-5921
 三河営業所 TEL:0564-54-5447 熊本営業所 TEL:096-345-2253